



CAMA ORTOPEDICA MANUAL



MANUAL DE USO

INTRODUCCION

La cama ortopédica manual de **Care-Quip Argentina** ha sido diseñada como ayuda técnica para el uso domiciliario o institucional de personas discapacitadas por parálisis, pérdida de miembros, defectos o deformaciones en los miembros, articulaciones anquilosadas o dañadas, insuficiencia cardíaca y circulatoria, trastornos de equilibrio, caquexia o edad avanzada. Para un usuario individual de hasta 160kg de peso, ofreciendo regulación de ángulo de respaldo y regulación de ángulo de rodilla. Además, la cama es desmontable para su fácil traslado, incluso por lugares de difícil acceso. La cama ortopédica manual es apta para uso diario en ambientes secos. Posee ruedas giratorias con frenos, para uso en suelos llanos, lisos y firmes.

Los accesorios adicionales para un adecuado uso de la cama deben ser adquiridos por separado. Los mismos son:

- Colchón ortopédico
- Mesa para cama

El uso adecuado dará como resultado un producto duradero, manteniendo la buena relación precio-calidad, ofreciendo confort y versatilidad al usuario para la solución de problemas de movilidad.

Es fundamental leer y entender todo el contenido de este manual de uso antes de utilizar el producto.

El uso incorrecto del producto podría perjudicar al mismo, al usuario y/o terceros.

Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

PRESENTACION

La presentación de la cama ortopédica manual es individual, embalada en una caja que incluye:

Cabecera (más alta)	X 1
Piecera (más baja)	X 1
Estructura con lechos	X 1
Estructura con ruedas	X 2
Barandas retractiles	X 2
Porta suero	X 1
Parrilla porta objetos	X 1
Manual de uso	X 1

ADVERTENCIAS

- Leer atentamente el manual de usuario antes de usar la cama ortopédica manual.
- Conservar siempre este manual.
- No utilizar la cama ortopédica manual para otro uso que no sea el previsto por el fabricante.
- Al armar, regular y desarmar la cama, prestar atención para no sufrir accidentes, lesiones y/o aplastamientos en las manos.
- Verificar siempre antes de utilizar la cama que la estructura está correctamente ensamblada.
- Comprobar que la cama haya quedado sobre una superficie plana y segura.
- Colocar los accesorios de forma correcta.
- Al utilizar la cama ortopédica manual siempre tener presente los riesgos de lesiones hacia el usuario y/o terceros.
- Avisar al paciente cada vez que se realice una regulación de la cama.
- Mantener debidamente ajustadas las sábanas, ropa de cama, catéteres, cables de equipamientos, etc. para que los mismos no se enganchen con las partes móviles de la cama.
- Mantener la cama a una distancia mayor de 30 cm de cualquier fuente directa de calor.
- La cama ortopédica manual es para el uso de un solo paciente.
- La cama ortopédica manual no debe usarse para transportar al paciente de una habitación a otra.
- Antes de movilizar, levantar o acostar al paciente, activar los frenos de las ruedas de la cama.
- Si el paciente no está bajo supervisión, las barandas laterales deben estar activadas para reducir el riesgo de caídas. Además, las barandas deberán estar activadas en ambos lados en todo momento que use el paciente la cama, incluso cuando la cama esté situada contra una pared.
- Para pacientes espásticos y/o psicóticos usar cinturones de seguridad o de restricción, según indicación médica, para prevenir accidentes y/o caídas.
- Respetar el peso máximo admitido de 160 kg.


CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA CAMA ORTOPEDICA MANUAL

- Estructura en acero con terminación epoxi color beige y con lechos rígidos aptos para masajes cardiacos.
- Cabecera y piecera desmontables de plástico de alto impacto.
- Ruedas giratorias de 12 cm con frenos.
- Movimientos manuales de los lechos mediante manivelas telescópicas:
 - Regulación de ángulo de respaldo: 0 – 85°
 - Regulación de ángulo de rodilla: 0 – 45°
- Peso máximo sugerido del paciente 160 kg.
- Largo total de la cama 210 cm.
- Ancho total de la cama 98 cm.

ARMADO DE LA CAMA ORTOPEDICA MANUAL

Al momento de armar la cama se recomienda hacerlo entre 2 o más personas y que sea un lugar con bastante espacio. El lugar donde se colocara la cama debe disponer de un piso firme, horizontal y liso.

1. Colocar la caja acostada horizontalmente permitiendo la correcta lectura del marcado de la misma. No destruir los embalajes hasta asegurarse que todo esté en orden.
2. Abrir la caja sacando la tapa externa de la misma hacia arriba.
3. Sacar todos los componentes de la caja y dejar solo la estructura con los lechos.
4. Conectar y colocar los tornillos con tuercas en las barras de transmisión para regulación de lechos.

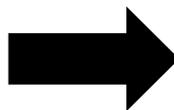

5. Colocar las estructuras con ruedas y colocar los tornillos con tuercas.



6. Sacar la cama de la caja, girar y apoyar sobre las ruedas. Tener cuidado con los lechos que son móviles y se puede presentar riesgos de atrapamiento de manos al girar la cama.



7. Colocar la piecera (más chica) en los anclajes del lado de las manivelas.

8. Colocar la cabecera (más grande) en los otros anclajes.



9. Colocar las barandas con el gatillo rojo hacia el lado de la piecera y colocar los tornillos con tuercas.
10. Colocar la manija en el trapecio y ajustar el largo de la correa.
11. Colocar el porta suero, regular la altura y ajustar la perilla.
12. Colocar la parrilla porta objetos.

USO DE LA CAMA ORTOPEDICA MANUAL

Las regulaciones de ángulo de respaldo y de ángulo de rodilla se realizan mediante manivelas y así podrá alcanzar la posición deseada de los lechos de la cama ortopédica manual. Por medio de la manivela izquierda podrá elevar y descender el lecho de respaldo hasta la posición deseada. A través de la manivela derecha podrá elevar y descender el lecho de las piernas hasta la posición deseada.

De esta forma obtendrá el máximo confort del paciente y la óptima comodidad de trabajo para el cuidador/profesional. Utilizar la cama sobre suelos llanos, lisos y firmes.

Antes de movilizar, levantar o acostar al paciente, activar los frenos de las ruedas de la cama.

Al mover la cama dentro de la habitación, el paciente deberá estar recostado y con las barandas colocadas.

MANTENIMIENTO

- Inspeccionar regularmente en búsqueda de cualquier desperfecto que pudiera comprometer la integridad de la cama ortopédica manual y su correcto funcionamiento.
- Todos los bulones, trabas y tuercas deben estar ajustados.
- Operar las manivelas de la cama ortopédica manual para asegurarse que funcionen correctamente.
- Cuando estén activados los frenos de las ruedas, la cama ortopédica manual no deberá moverse.
- Cuando no estén activados los frenos de las ruedas la cama ortopédica manual deberá moverse con facilidad.
- La lubricación periódica de las piezas móviles extenderá la vida útil de la cama ortopédica manual. Utilizar lubricante en aerosol y limpiar cualquier exceso del mismo, caso contrario, se fomentará la acumulación de polvo en ésta zona. Antes del primer uso, y luego periódicamente lubrique en:
 - Articulación de lechos
 - Barras de transmisión para regulación de lechos
 - Engranajes
 - Ruedas
 - Manivelas

- En caso de no utilizar la cama ortopédica manual por un largo periodo de tiempo, la cama se podrá desarmar para su fácil almacenamiento.
- Almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.

Para una vida útil más larga de la cama ortopédica manual es importante realizar periódicamente una limpieza general. La periodicidad de la limpieza debe ser de al menos cada quince días. Se sugiere realizarla de la siguiente manera:

- Limpiar periódicamente la cama ortopédica manual con un paño suave o una esponja humedecida en agua y detergente inocuo, para quitar el polvo que pueda estar acumulado en la estructura de la misma.
- Secar completamente.
- Nunca limpiar la cama ortopédica manual con diluyentes, solventes o abrasivos, aun cuando se tenga que eliminar una mancha difícil.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, conexiones incorrectas, uso en distintas condiciones a las descriptas en éste manual o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparación bajo garantía se deberá presentar éste certificado debidamente completado, junto a la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora:

Fecha:

Firma:

Aclaración:



OTRA INFORMACION:

Importador: Target Medical S.A.
La Horqueta 1124, Monte Grande 1842, Buenos Aires, Argentina

Director Técnico:
Ing. Eduardo Daniel Hurden, Matricula 4899

Fabricante: Foshan Shunde Kangshen Medical Equipment Industry Co Ltd.
Xinlu Industrial Area Bijiang Neighbourhood Committee Beijiao Town, Shunde
District Foshan City, China.

PM-1813-27

I223

Garantía 1 año

Vida útil 2 años