



## RESPALDO REGULABLE PARA CAMA



### MANUAL DE USO

**OTRA INFORMACION:**

**Importador: Target Medical S.A.**  
La Horqueta 1124, Monte Grande 1842, Buenos Aires, Argentina

**Director Técnico:**  
**Ing. Eduardo Daniel Hurden**, Matricula 4899

**Fabricante: Shenzhen Otto Medical Co., Ltd.**  
3L Qihang Business Building, Shenfeng Road, Liuyue, Henggang, Longgang, Shenzhen, China

**Códigos I101**

**Garantía 1 año**

**Vida útil 2 años**



## RESPALDO REGULABLE PARA CAMA



### MANUAL DE USO

**OTRA INFORMACION:**

**Importador: Target Medical S.A.**  
La Horqueta 1124, Monte Grande 1842, Buenos Aires, Argentina

**Director Técnico:**  
**Ing. Eduardo Daniel Hurden**, Matricula 4899

**Fabricante: Shenzhen Otto Medical Co., Ltd.**  
3L Qihang Business Building, Shenfeng Road, Liuyue, Henggang, Longgang, Shenzhen, China

**Códigos I101**

**Garantía 1 año**

**Vida útil 2 años**

## INTRODUCCION

El respaldo regulable para cama **Care-Quip Argentina** ha sido diseñado para brindar comodidad al paciente en cama, facilitando la alimentación, lectura y demás actividades. Es fundamental leer y entender todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto. El uso incorrecto del producto podría perjudicar al mismo, al usuario y/o terceros. Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

## ADVERTENCIAS

- Leer detenidamente todo el contenido de este manual de uso antes de utilizar el respaldo regulable para cama.
- No utilizar para otro uso que no sea el de brindar comodidad al paciente en cama, facilitando la alimentación, lectura y demás actividades.
- Asegurarse que todos los tornillos estén ajustados antes de utilizarlo.
- Asegurarse que la regulación de inclinación este bien colocada.
- Es importante que sea inspeccionado regularmente en busca de cualquier defecto.
- No utilizar si alguno de los tubos de la estructura estuvieran doblados o quebrados.
- No exponer al calor directo.

## MANTENIMIENTO

- Limpiar por lo menos una vez por semana, con un paño suave y húmedo, quitando el polvo que pueda estar acumulado.
- Nunca limpiar con productos abrasivos, amoníacos, lavandinas o diluyentes.
- En caso de haber mojado, secar completamente con un paño suave lo antes posible y dejar en un lugar cálido y seco, hasta asegurarse de haber logrado un secado total.
- Es importante que sea inspeccionado regularmente, y asegurarse que:
  - Las uniones no estén flojas.
  - Los tubos de la estructura no estén doblados, ni quebrados.
- En caso de no utilizar por un largo período de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, conexiones incorrectas, uso en distintas condiciones a las descritas en éste manual o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparación bajo garantía se deberá presentar éste certificado debidamente completado, junto a la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora: .....

Fecha: .....

Firma: ..... Aclaración: .....

## INTRODUCCION

El respaldo regulable para cama **Care-Quip Argentina** ha sido diseñado para brindar comodidad al paciente en cama, facilitando la alimentación, lectura y demás actividades. Es fundamental leer y entender todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto. El uso incorrecto del producto podría perjudicar al mismo, al usuario y/o terceros. Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

## ADVERTENCIAS

- Leer detenidamente todo el contenido de este manual de uso antes de utilizar el respaldo regulable para cama.
- No utilizar para otro uso que no sea el de brindar comodidad al paciente en cama, facilitando la alimentación, lectura y demás actividades.
- Asegurarse que todos los tornillos estén ajustados antes de utilizarlo.
- Asegurarse que la regulación de inclinación este bien colocada.
- Es importante que sea inspeccionado regularmente en busca de cualquier defecto.
- No utilizar si alguno de los tubos de la estructura estuvieran doblados o quebrados.
- No exponer al calor directo.

## MANTENIMIENTO

- Limpiar por lo menos una vez por semana, con un paño suave y húmedo, quitando el polvo que pueda estar acumulado.
- Nunca limpiar con productos abrasivos, amoníacos, lavandinas o diluyentes.
- En caso de haber mojado, secar completamente con un paño suave lo antes posible y dejar en un lugar cálido y seco, hasta asegurarse de haber logrado un secado total.
- Es importante que sea inspeccionado regularmente, y asegurarse que:
  - Las uniones no estén flojas.
  - Los tubos de la estructura no estén doblados, ni quebrados.
- En caso de no utilizar por un largo período de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, conexiones incorrectas, uso en distintas condiciones a las descritas en éste manual o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparación bajo garantía se deberá presentar éste certificado debidamente completado, junto a la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora: .....

Fecha: .....

Firma: ..... Aclaración: .....