




BASTONES PARA CIEGO

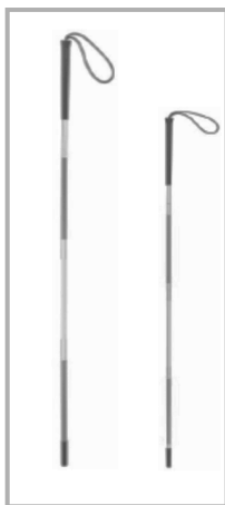

MANUAL DE USO

OTRA INFORMACION:

Importador: Target Medical S.A.

La Horqueta 1124, Monte Grande 1842, Provincia de Buenos Aires, Argentina

Director Técnico:

Ing. Eduardo Daniel Hurden, Matricula 4899

Fabricante: Apex Health Care Manufacturing Inc.

20 Industrial 3rd Road, Tou Chiao Industrial Park, Ming Hsiung Shiang,
Chia-Yi Hsien, Taiwán

Códigos C157 / C158

Garantía 1 año

Vida útil 2 años

93060 Emisión 1 04/2017



BASTONES PARA CIEGO



MANUAL DE USO

OTRA INFORMACION:

Importador: Target Medical S.A.

La Horqueta 1124, Monte Grande 1842, Provincia de Buenos Aires, Argentina

Director Técnico:

Ing. Eduardo Daniel Hurden, Matricula 4899

Fabricante: Apex Health Care Manufacturing Inc.

20 Industrial 3rd Road, Tou Chiao Industrial Park, Ming Hsiung Shiang,
Chia-Yi Hsien, Taiwán

Códigos C157 / C158

Garantía 1 año

Vida útil 2 años

93060 Emisión 1 04/2017

INTRODUCCION

Los bastones para visión reducida **Care-Quip Argentina** han sido diseñados para ayudar en la movilidad de un usuario individual ciego y son aptos para el uso diario. El uso adecuado dará como resultado un producto duradero, manteniendo una buena relación de precio-calidad, ofreciendo confort y versatilidad al usuario para la solución de problemas de movilidad.

Es fundamental leer y entender todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto.

El uso incorrecto del producto podría perjudicar al mismo, al usuario y/o terceros.

Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

ADVERTENCIAS

- Lea detenidamente todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto.
- Este producto debe ser chequeado regularmente en busca de cualquier defecto que ponga en riesgo la seguridad del usuario.

MANTENIMIENTO

- Limpiar el producto por lo menos una vez por semana, con un paño suave y húmedo, quitando el polvo que pueda estar acumulado.
- Nunca limpiar con productos abrasivos, amoníacos, lavandinas o diluyentes.
- En caso de haber mojado el producto, secar completamente con un paño suave y seco lo antes posible y dejar en un lugar cálido y seco, hasta asegurarse de haber logrado un secado total.
- En caso de no utilizar el producto por un largo período de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, conexiones incorrectas, uso en distintas condiciones a las descritas en éste manual o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparación bajo garantía se deberá presentar éste certificado debidamente completado, junto a la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora:

Fecha:

Firma:

Aclaración:

INTRODUCCION

Los bastones para visión reducida **Care-Quip Argentina** han sido diseñados para ayudar en la movilidad de un usuario individual ciego y son aptos para el uso diario. El uso adecuado dará como resultado un producto duradero, manteniendo una buena relación de precio-calidad, ofreciendo confort y versatilidad al usuario para la solución de problemas de movilidad.

Es fundamental leer y entender todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto.

El uso incorrecto del producto podría perjudicar al mismo, al usuario y/o terceros.

Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

ADVERTENCIAS

- Lea detenidamente todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto.
- Este producto debe ser chequeado regularmente en busca de cualquier defecto que ponga en riesgo la seguridad del usuario.

MANTENIMIENTO

- Limpiar el producto por lo menos una vez por semana, con un paño suave y húmedo, quitando el polvo que pueda estar acumulado.
- Nunca limpiar con productos abrasivos, amoníacos, lavandinas o diluyentes.
- En caso de haber mojado el producto, secar completamente con un paño suave y seco lo antes posible y dejar en un lugar cálido y seco, hasta asegurarse de haber logrado un secado total.
- En caso de no utilizar el producto por un largo período de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, conexiones incorrectas, uso en distintas condiciones a las descritas en éste manual o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparación bajo garantía se deberá presentar éste certificado debidamente completado, junto a la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora:

Fecha:

Firma:

Aclaración: