



BARANDAS TELESCÓPICAS PARA CAMA



MANUAL DE USO

OTRA INFORMACION:

Fabricante: Target Medical S.A.
La Horqueta 1124, B1842BLF Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, Argentina

Director Técnico:
Ing. Eduardo Daniel Hurden, Matricula 4899

Código I104

Garantía 1 año

Vida útil 2 años

93039 Emisión 2 04/2016



BARANDAS TELESCÓPICAS PARA CAMA



MANUAL DE USO

OTRA INFORMACION:

Fabricante: Target Medical S.A.
La Horqueta 1124, B1842BLF Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, Argentina

Director Técnico:
Ing. Eduardo Daniel Hurden, Matricula 4899

Código I104


Garantía 1 año

Vida útil 2 años

93039 Emisión 2 04/2016

BARANDAS TELESCÓPICAS PARA CAMA

Las barandas **Care-Quip Argentina** han sido diseñadas para brindar seguridad y evitar accidentes en usuarios de camas. Fabricadas en acero cromado con soportes extensibles entre 71 y 110 cm, barandas extensibles entre 110 y 185 cm, altura regulable en 2 posiciones. Estas son adaptables a la mayoría de las camas. Incluye 4 trabas con pernos y 4 precintos.

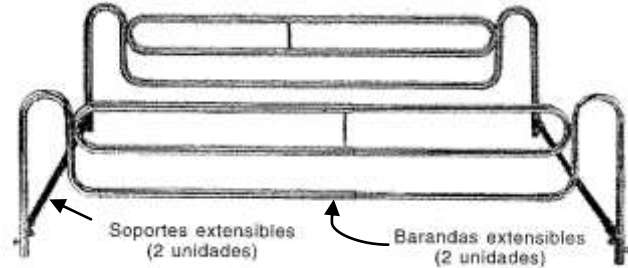

INSTRUCCIONES DE ARMADO

1. Retirar el colchón.
2. Colocar un soporte cerca de la cabecera y el otro cerca de la piecera de la cama. Enganchar ambos extremos del mismo en los laterales de la cama. Para mayor seguridad, sujetar los soportes a los laterales de las camas con los precintos provistos.
3. Extender las barandas hasta el largo requerido y colocarlas en los extremos de los soportes.
4. Regular la altura y colocar las trabas con perno.
5. Colocar nuevamente el colchón.

ADVERTENCIA

Para mayor seguridad los soportes se deben colocar entre el colchón y los elásticos de la cama. No se deben colocar por debajo de los elásticos de la cama.

MANTENIMIENTO

- Limpiar las barandas telescópicas por lo menos una vez por semana, con un paño suave y húmedo, quitando el polvo que pueda estar acumulado.
- Nunca limpiar las barandas con productos abrasivos, amoníacos, lavandinas o diluyentes.
- En caso de haber mojado las barandas telescópicas, secar completamente con un paño suave lo antes posible y dejar en un lugar cálido y seco, hasta asegurarse de haber logrado un secado total.
- En caso de no utilizar las barandas telescópicas por un largo período de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, conexiones incorrectas, uso en distintas condiciones a las descriptas en este manual o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparación bajo garantía se deberá presentar este certificado debidamente completado, junto a la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.


Casa vendedora:

Fecha:

Firma: Aclaración:

BARANDAS TELESCÓPICAS PARA CAMA

Las barandas **Care-Quip Argentina** han sido diseñadas para brindar seguridad y evitar accidentes en usuarios de camas. Fabricadas en acero cromado con soportes extensibles entre 71 y 110 cm, barandas extensibles entre 110 y 185 cm, altura regulable en 2 posiciones. Estas son adaptables a la mayoría de las camas. Incluye 4 trabas con pernos y 4 precintos.

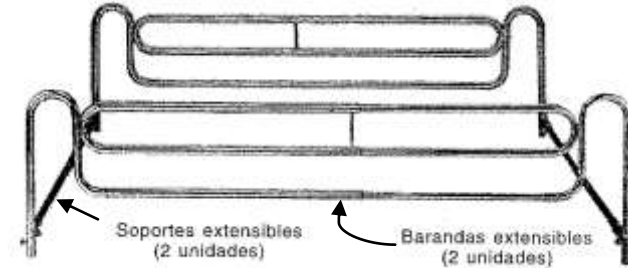

INSTRUCCIONES DE ARMADO

6. Retirar el colchón.
7. Colocar un soporte cerca de la cabecera y el otro cerca de la piecera de la cama. Enganchar ambos extremos del mismo en los laterales de la cama. Para mayor seguridad, sujetar los soportes a los laterales de las camas con los precintos provistos.
8. Extender las barandas hasta el largo requerido y colocarlas en los extremos de los soportes.
9. Regular la altura y colocar las trabas con perno.
10. Colocar nuevamente el colchón.

ADVERTENCIA

Para mayor seguridad los soportes se deben colocar entre el colchón y los elásticos de la cama. No se deben colocar por debajo de los elásticos de la cama.

MANTENIMIENTO

- Limpiar las barandas telescópicas por lo menos una vez por semana, con un paño suave y húmedo, quitando el polvo que pueda estar acumulado.
- Nunca limpiar las barandas con productos abrasivos, amoníacos, lavandinas o diluyentes.
- En caso de haber mojado las barandas telescópicas, secar completamente con un paño suave lo antes posible y dejar en un lugar cálido y seco, hasta asegurarse de haber logrado un secado total.
- En caso de no utilizar las barandas telescópicas por un largo período de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, conexiones incorrectas, uso en distintas condiciones a las descriptas en este manual o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparación bajo garantía se deberá presentar este certificado debidamente completado, junto a la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora:

Fecha:

Firma: Aclaración: