



ALMOHADONES JAY

OTRA INFORMACION:

Importador: Target Medical S.A.
La Horqueta 1124, B1842BLF Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, Argentina

Director Técnico:
Ing. Eduardo Daniel Hurden, Matrícula 4899

PM-1813-20

Fabricante:
Sunrise Medical Inc. (Mobility Products Division)
2842 Business Park Avenue, Fresno, CA 92154, Estados Unidos

Sunrise Medical Inc. (Mobility Products Division)
7477 East Dry Creek Parkway, Longmont, Co 80503, Estados Unidos

Sunrise Medical Technologies S.A. de C.V.
Privada Misiones # 10, Tijuana 22575, México

Garantía 1 año

Vida útil 2 años

93036 Emisión 3 03/2019



Almohadón Jay Basic



Almohadón Jay Easy Fluid



Almohadón Jay X2



Almohadón Jay Fusion

MANUAL DE USO

INTRODUCCION

Los almohadones Jay están diseñados para protección de la piel, prevención antiescaras, buen posicionamiento y confort del usuario, a la vez no restringen los movimientos permitiendo cambiar de posición. Los almohadones son livianos, cómodos y de bajo mantenimiento.

El almohadón Jay proporciona reducción en la presión y en la ruptura de la piel que puede reducir la incidencia de úlceras de decúbito.

El producto puede ser utilizado por el paciente sin supervisión médica ya que su utilización de acuerdo a las indicaciones del fabricante, no implican peligro alguno para el paciente si se tienen en cuenta las advertencias y precauciones.

La capacidad máxima de peso del usuario que soporta es de 113 kg.

Es fundamental leer y entender todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el almohadón. El uso incorrecto del almohadón podría perjudicar al mismo, al usuario y/o a terceros.

Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

Presentación

Almohadón Jay Basic

- Base de espuma moldeada
- Funda resistente a la incontinencia y humedad

Almohadón Jay Easy Fluid con base plana o base curva

- Base de espuma contorneada
- Funda resistente a la incontinencia y humedad
- Bolsa de fluido

Almohadón Jay X2

- Base de espuma contorneada
- Funda resistencia a la incontinencia y humedad
- Bolsa de fluido
- Cuña adductora
- Funda respirable

Almohadón Jay Fusion

- Base con múltiples capas de espuma contorneada
- Inserto de celdillas ROHO de dos válvulas
- Funda interior con cierre Aquaguard
- Funda exterior de tela X-static

ADVERTENCIAS

- Leer detenidamente todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el almohadón.
- No utilice el ancho del asiento de la silla de ruedas como guía para determinar la anchura apropiada del almohadón. Una elección inadecuada del almohadón puede ser perjudicial para el desempeño de la función del mismo.
- Instalar el almohadón en una silla de ruedas puede afectar el centro de gravedad de la misma y puede provocar que la silla de ruedas se vuelque así atrás, provocando lesiones graves. Evalúe siempre la necesidad de instalar las ruedas antivuelco o abrazaderas que adaptan el eje para pacientes amputados para evitar accidentes y aumentar la estabilidad.
- Los almohadones que incluyen bolsa de fluido están diseñados para ayudar a reducir la incidencia de úlceras de la piel provocadas por una presión continua. Sin embargo, ningún almohadón puede eliminar por completo la presión de sentado o evitar las úlceras de la piel provocadas por la presión.
- Los almohadones no son sustitutos de un buen cuidado de la piel, incluyendo una dieta apropiada, limpieza y alivio periódico de la presión.
- El líquido de la bolsa de fluido se puede separar, quedando en lugares delgados y acuosos y en otros lugares gruesos y espesos. De presentar esta inconsistencia o cualquier otra, masajéelo hasta que recupere su consistencia original.
- No deje el almohadón en exteriores o a la intemperie, ni a temperaturas menores de 5°C (40°F).
- Evitar utilizar el almohadón sobre un tapizado de asiento que este estirado. El tapizado estirado no proporciona un soporte adecuado del almohadón y puede provocar un posicionamiento inapropiado. Reemplace el tapizado o adquiera la tabla sólida Jay.
- Evitar utilizar el tapizado del respaldo si está estirado. El tapizado estirado no proporciona un soporte adecuado para el cuerpo y puede provocar un posicionamiento inapropiado. Reemplace el tapizado o adquiera el respaldo Jay.

Precauciones:

- Antes de sentarse sobre el almohadón por un tiempo prolongado, esté deberá probarse durante una cuantas horas mientras inspecciona su piel para asegurarse que no se desarrollen manchas rojas por la presión.
- Deberá revisarse con frecuencia la piel en busca de enrojecimiento (indicador clínico de ruptura de tejido). De presentarse enrojecimiento no utilice el almohadón y consulte de inmediato a su médico o terapeuta.

Mantenimiento

La limpieza y el mantenimiento periódico pueden ayudar a prolongar la vida útil del almohadón. Se recomienda inspeccionar los componentes durante la limpieza.

Buscar rasgaduras y/o desgastes excesivos en la funda.

Revisar por daños y fallas la base de espuma contorneada.

En modelos que presentan bolsa de fluido buscar pinchazos o cualquier otra anomalía. Si el líquido de la bolsa de fluido está más espeso en una parte, simplemente masajéela para devolverle al líquido su consistencia original.

- Limpieza de la funda

Retirar la funda de la base de espuma contorneada y dar vuelta el interior para que quede por fuera. Sacar la bolsa de fluido, en los modelos que la incluyan, separando las tiras Velcro.

Lavar la funda en lavarropas o a mano con agua caliente y secar en secarropas de bajo calor o al sol.

No usar cloro.

No planchar.

No lavar las fundas en tintorerías, ni use lavarropas y secarropas industriales.

- Limpieza de la base espuma

Retirar la funda y la bolsa de fluido, en modelos que la incluyan, de la base espuma. Limpiar suavemente con un trapo húmedo. Secar suavemente con un trapo limpio. Dejar secar completamente antes de su ensamblado.

No usar jabón.

No sumergir la base de espuma en agua.

- Limpieza de la bolsa de fluido, en modelos que la incluyan.

Retirar la funda de la base espuma. Retirar la bolsa de fluido interna y limpiarla con agua tibia y jabón. Enjuagarla con un trapo limpio y húmedo. Luego secarla suavemente con un trapo limpio.

No sumergir la bolsa de fluido en ningún líquido.

- Ensamblado del almohadón después de limpiarlo.

Siga las instrucciones de limpieza y mantenimiento, luego ensamblar de la siguiente manera:

Colocar la bolsa de fluido, en los modelos que la incluyan, en el compartimiento de la funda y asegurarse de alinear adecuadamente las tiras Velcro. Colocar la base de espuma dentro de la funda, asegurarse que el cierre quede en la parte posterior de la base espuma.

Instrucciones especiales para operaciones y/o uso

Seleccionar el almohadón dependiendo del ancho de cadera cuando el usuario se encuentre sentado. Colocar el almohadón en la silla de ruedas con las etiquetas y la bolsa de fluido hacia atrás. Cuando se adapta correctamente el almohadón con el usuario, la cadera deberá quedar en la parte posterior de la silla. Los huesos isquiáticos (huesos de la cadera) deben estar centrados en la bolsa de fluido y en el contorno de la base de espuma. El ajuste de la altura de los apoyapiés de la silla de ruedas puede aumentar la comodidad del usuario y ayudar a disminuir la presión. Ajustar los apoyapiés de tal manera que sus pies queden apoyados en las pedanas y las piernas descansen con comodidad en el almohadón.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo. Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, conexiones incorrectas, uso en distintas condiciones a las descriptas en éste manual o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparación bajo garantía se deberá presentar éste certificado debidamente completado, junto a la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora:

Fecha:

Firma: Aclaración: