



## ASIENTOS PARA DUCHA

### OTRA INFORMACION:

**Fabricante: Target Medical S.A.**

La Horqueta 1124, B1842BLF Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, Argentina

**Director Técnico:**

**Ing. Eduardo Daniel Hurden, Matricula 4899**

**PM-1813-15**

**Códigos D100 / D104 / D105**

**Garantía 1 año**

**Vida útil 2 años**

**93012 Emisión 2 04/2016**



D100



D104



D105

## MANUAL DE USO

## INTRODUCCION

Los asientos para ducha **Care-Quip Argentina** han sido diseñados como ayuda técnica para facilitar el lavado e higienizado de personas con movilidad reducida. Proveen soporte y estabilidad adicional a las personas y ayudan a evitar posibles accidentes en el baño. Los mismos han sido diseñados para un usuario individual de hasta 100 Kg. La gama de asientos está compuesta por los siguientes códigos:

- D100 - Silla para ducha sin respaldo
- D104 - Silla para ducha con respaldo
- D105 - Banco de transferencia para ducha

El uso adecuado dará como resultado un producto duradero, manteniendo una buena relación de precio-calidad.

Es fundamental leer y entender todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto.

El uso incorrecto del producto podría perjudicar al mismo, al usuario y/o terceros.

Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

## CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS ASIENTOS PARA DUCHA

Especificaciones Técnicas Tipo y Códigos	Material de fabricación, terminación y color	Ancho y profundidad de asiento (cm)	Ancho total (cm)	Altura del asiento (cm)	Peso total (kg)	Otras especificaciones
Silla para ducha sin respaldo D100	Aluminio Ultraliviano anodizado plateado	41.5 X 37	44	40 – 58	2,3	-
Silla para ducha con respaldo D104	Aluminio ultraliviano anodizado plateado	41.5 X 37	44	40 – 58	3,2	• Altura del respaldo 33 cm
Banco de transferencia para ducha D105	Aluminio ultraliviano anodizado plateado	65 X 46	68	44 - 59	4,7	• Altura del respaldo 33 cm • Apoyabrazo reversible • Espacio libre debajo del asiento 37 a 51 cm

## INSTRUCCIONES DE USO

Antes de utilizar el asiento para ducha, regular la altura de las cuatro patas por medio de las trabas con perno. La altura correcta del asiento para ducha permite que el usuario conserve una postura segura al sentarse.

Es importante que al sentarse y al levantarse el usuario sea asistido por un tercero o mediante barras de sujeción instaladas en el baño para evitar posibles accidentes.

- **AL SENTARSE**  
Posicionarse frente el asiento para ducha.  
Girar 180° hasta tocar el asiento para ducha con la parte posterior de las piernas.  
Inclinarse hacia adelante y sentarse lentamente.
- **AL LEVANTARSE**  
Inclinarse hacia adelante y levantarse lentamente.

## ADVERTENCIAS

- Lea detenidamente todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el asiento para ducha.
- No utilice el asiento para otro uso que no sea el de sentar, lavar e higienizar al paciente.
- Respete el peso máximo admitido del asiento para ducha.
- Es importante que el asiento para ducha sea inspeccionado regularmente en busca de cualquier defecto que ponga en riesgo la seguridad del usuario.
- Ajuste las uniones del asiento para ducha si estuvieran flojas.
- Cambie los regatones antideslizantes de las patas si estuvieran flojos, gastados o dañados.
- No utilice el asiento para ducha si los agujeros en las zonas de ajuste estuvieran elongados, o si alguna de las patas estuviera doblada o quebrada.

## MANTENIMIENTO

- Secar completamente el asiento para ducha con un paño suave después de cada utilización.
- Nunca limpiar el asiento para ducha con productos abrasivos, amoniacos, lavandinas o diluyentes.
- Es importante que el asiento para ducha sea inspeccionado regularmente, y asegurarse que:
  - Las uniones del asiento para ducha no estén flojas.
  - Las patas no estén dobladas, ni quebradas.
  - Los agujeros en la zona de ajuste de las patas no estén elongados.
  - Los regatones no estén flojos, rotos o gastados.
- En caso de no utilizar el asiento para ducha por un largo período de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (DOCE) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, uso en distintas condiciones a las descritas en éste manual, o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparación bajo garantía, se deberá presentar con la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora: .....

Fecha: .....

Firma: ..... Aclaración: .....