



## BASTONES, TRIPODES Y CUADRUPLES



### MANUAL DE USO

#### OTRA INFORMACION:

**Importador: Target Medical S.A.**

La Horqueta 1124, B1842BLF Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, Argentina

**Director Técnico:**

**Ing. Eduardo Daniel Hurden, Matricula 4899**

**Fabricante: Foshan Dongfang Medical Equipment Manufacturing Ltd.**

N 1 Puland Road, Foshan City, Guangdong Province 528000, China

**Códigos C115B / C115N / C115P / C118B / C118N / C118P / C125B / C125N / C125P / C151 / C155 / C157 / C158 / C159 / C201 / C202 / C211 / C212 / C241 / C242**

**Garantía 1 año**

**Vida útil 2 años**

**93017 Emisión 3 07/2018**



## BASTONES, TRIPODES Y CUADRUPLES



### MANUAL DE USO

#### OTRA INFORMACION:

**Importador: Target Medical S.A.**

La Horqueta 1124, B1842BLF Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, Argentina

**Director Técnico:**

**Ing. Eduardo Daniel Hurden, Matricula 4899**

**Fabricante: Foshan Dongfang Medical Equipment Manufacturing Ltd.**

N 1 Puland Road, Foshan City, Guangdong Province 528000, China

**Códigos C115B / C115N / C115P / C118B / C118N / C118P / C125B / C125N / C125P / C151 / C155 / C157 / C158 / C159 / C201 / C202 / C211 / C212 / C241 / C242**

**Garantía 1 año**

**Vida útil 2 años**

**93017 Emisión 3 07/2018**

## INTRODUCCION

Los bastones, trípodes y cuádruples **Care-Quip Argentina** han sido diseñados para ayudar en la movilidad de un usuario individual y son aptos para el uso diario. El uso adecuado dará como resultado un producto duradero, manteniendo una buena relación de precio-calidad, ofreciendo confort y versatilidad al usuario para la solución de problemas de movilidad.

Es fundamental leer y entender todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto.

El uso incorrecto del producto podría perjudicar al mismo, al usuario y/o terceros.

Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

## INSTRUCCIONES DE USO

**Altura:** La altura correcta permite que el usuario conserve una postura erecta con su codo ligeramente flexionado. Así, el peso del cuerpo descansa al caminar.

**Uso:** El producto debe ser utilizado con el mango orientado hacia atrás y normalmente empuñado con la mano opuesta a la pierna afectada.

**Al caminar:** Apoyar el producto en el suelo al mismo tiempo que lo hace con la pierna afectada.

**Al levantarse de una silla:** Inclinar hacia adelante, con una mano en el apoyabrazo de la silla y la otra en el producto. Incorporarse hacia adelante.

**Al sentarse en una silla:** Girar sobre sí mismo, hasta tocar la silla con la parte posterior de las piernas, apoyar las manos suavemente en los apoyabrazos, inclinarse hacia adelante y sentarse lentamente.

**Al subir o bajar escaleras:** Aferrarse del pasamano de la escalera y subir o bajar los escalones apoyando la ayuda para movilidad en el mismo escalón que la pierna afectada. La pierna no afectada debe ir siempre adelante.

## ADVERTENCIAS

- Lea detenidamente todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto.
- Este producto debe ser chequeado regularmente en busca de cualquier defecto que ponga en riesgo la seguridad del usuario.
- Si los agujeros en la zona de ajuste están elongados o la pata está quebrada, no usar el producto.
- Si el regatón está gastado, debe cambiarlo.
- El uso en días de lluvia debe hacerse con máximo cuidado para evitar caídas.

## MANTENIMIENTO

- Limpiar el producto por lo menos una vez por semana, con un paño suave y húmedo, quitando el polvo que pueda estar acumulado.
- Nunca limpiar con productos abrasivos, amoníacos, lavandinas o diluyentes.
- En caso de haber mojado el producto, secar completamente con un paño suave y seco lo antes posible y dejar en un lugar cálido y seco, hasta asegurarse de haber logrado un secado total.
- En caso de no utilizar el producto por un largo período de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.
- Los regatones son vulnerables al desgaste. Se recomienda su reemplazo para evitar cualquier tipo de accidente.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, conexiones incorrectas, uso en distintas condiciones a las descriptas en éste manual o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparación bajo garantía se deberá presentar éste certificado debidamente completado, junto a la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora: .....

Fecha: .....

Firma: ..... Aclaración: .....

## INTRODUCCION

Los bastones, trípodes y cuádruples **Care-Quip Argentina** han sido diseñados para ayudar en la movilidad de un usuario individual y son aptos para el uso diario. El uso adecuado dará como resultado un producto duradero, manteniendo una buena relación de precio-calidad, ofreciendo confort y versatilidad al usuario para la solución de problemas de movilidad.

Es fundamental leer y entender todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto.

El uso incorrecto del producto podría perjudicar al mismo, al usuario y/o terceros.

Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

## INSTRUCCIONES DE USO

**Altura:** La altura correcta permite que el usuario conserve una postura erecta con su codo ligeramente flexionado. Así, el peso del cuerpo descansa al caminar.

**Uso:** El producto debe ser utilizado con el mango orientado hacia atrás y normalmente empuñado con la mano opuesta a la pierna afectada.

**Al caminar:** Apoyar el producto en el suelo al mismo tiempo que lo hace con la pierna afectada.

**Al levantarse de una silla:** Inclinar hacia adelante, con una mano en el apoyabrazo de la silla y la otra en el producto. Incorporarse hacia adelante.

**Al sentarse en una silla:** Girar sobre sí mismo, hasta tocar la silla con la parte posterior de las piernas, apoyar las manos suavemente en los apoyabrazos, inclinarse hacia adelante y sentarse lentamente.

**Al subir o bajar escaleras:** Aferrarse del pasamano de la escalera y subir o bajar los escalones apoyando la ayuda para movilidad en el mismo escalón que la pierna afectada. La pierna no afectada debe ir siempre adelante.

## ADVERTENCIAS

- Lea detenidamente todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto.
- Este producto debe ser chequeado regularmente en busca de cualquier defecto que ponga en riesgo la seguridad del usuario.
- Si los agujeros en la zona de ajuste están elongados o la pata está quebrada, no usar el producto.
- Si el regatón está gastado, debe cambiarlo.
- El uso en días de lluvia debe hacerse con máximo cuidado para evitar caídas.

## MANTENIMIENTO

- Limpiar el producto por lo menos una vez por semana, con un paño suave y húmedo, quitando el polvo que pueda estar acumulado.
- Nunca limpiar con productos abrasivos, amoníacos, lavandinas o diluyentes.
- En caso de haber mojado el producto, secar completamente con un paño suave y seco lo antes posible y dejar en un lugar cálido y seco, hasta asegurarse de haber logrado un secado total.
- En caso de no utilizar el producto por un largo período de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.
- Los regatones son vulnerables al desgaste. Se recomienda su reemplazo para evitar cualquier tipo de accidente.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, conexiones incorrectas, uso en distintas condiciones a las descriptas en éste manual o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparación bajo garantía se deberá presentar éste certificado debidamente completado, junto a la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora: .....

Fecha: .....

Firma: ..... Aclaración: .....