



## Colchón de Aire-agua



### MANUAL DE USO

#### OTRA INFORMACION:

**Importador: Target Medical S.A.**

La Horqueta 1124, B1842BLF Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, Argentina

**Director Técnico:**

**Ing. Eduardo Daniel Hurden, Matricula 4899**

**PM-1813-6**

**Fabricante:**

**Fabricante: Pe & Le Enterprise Ltd.**

16-5 266, Sec 1 Wunhua 2nd Road, Linkou Township, Taipei County 24448, Taiwan.

**Códigos F155**

**Garantía 3 meses**

**Vida útil 6 meses**

93025 Emisión 2 04/2016



## Colchón de Aire-agua



### MANUAL DE USO

#### OTRA INFORMACION:

**Importador: Target Medical S.A.**

La Horqueta 1124, B1842BLF Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, Argentina

**Director Técnico:**

**Ing. Eduardo Daniel Hurden, Matricula 4899**

**PM-1813-6**

**Fabricante:**

**Fabricante: Pe & Le Enterprise Ltd.**

16-5 266, Sec 1 Wunhua 2nd Road, Linkou Township, Taipei County 24448, Taiwan.

**Códigos F155**

**Garantía 3 meses**

**Vida útil 6 meses**

93025 Emisión 2 04/2016

## INSTRUCCIONES DE USO

- A. Con agua:
1. Mantener el colchón en forma vertical y llenar con agua a través de la boquilla hasta llegar al nivel "FLUID LEVEL". Tapar la boquilla.
  2. Colocar el colchón en forma horizontal sobre un colchón de goma espuma tradicional en la cama. Abrir el pico de inflado de aire, quitar todo el aire sobrante del colchón, por ejemplo, deslizando sobre la superficie un palo de escobillón. Una vez que haya eliminado todo el aire cerrar el pico de inflado.
  3. Comprimir la boquilla de llenado y el pico de inflado hacia adentro, para que toda la superficie del colchón sea uniforme.
- B. Con gel:
1. Mantener el colchón en forma vertical y llenar con agua a través de la boquilla hasta llegar al nivel "FLUID LEVEL".
  2. Añadir al agua la cantidad correcta de gel granulado y tapar la boquilla. Dejar transcurrir 4 horas antes de usar, este tiempo permite la activación total del gel.
  3. Colocar el colchón en forma horizontal sobre un colchón de goma espuma tradicional en la cama. Abrir el pico de inflado de aire, quitar todo el aire sobrante del colchón, por ejemplo, deslizando sobre la superficie un palo de escobillón. Una vez que haya eliminado todo el aire cerrar el pico de inflado.
  4. Comprimir la boquilla de llenado y el pico de inflado hacia adentro, para que toda la superficie del colchón sea uniforme.
- C. Con aire:
1. Inflar el colchón a través del pico de inflado de aire hasta que las puntas del colchón estén firmes y extendidas. Si nota que las puntas comienzan a enrollarse hacia adentro es un signo de que el colchón está demasiado inflado. Si esto ocurre desinflar levemente hasta que las puntas queden firmes y extendidas.
  2. Comprimir la boquilla de llenado y el pico de inflado hacia adentro, para que toda la superficie del colchón sea uniforme.
  2. Colocar el colchón en forma horizontal sobre un colchón de goma espuma tradicional en la cama.

## ADVERTENCIAS

- Lea detenidamente todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto.
- Acostarse suavemente y rotar cuidadosamente. Una rotación brusca puede provocar la rotura de una de las soldaduras del colchón.
- Peso máximo sugerido de 80 Kg para el colchón.

## MANTENIMIENTO

- Nunca limpiar con productos abrasivos, amoníacos, lavandinas o diluyentes.
- En caso de haber mojado el producto, secar completamente con un paño suave y seco lo antes posible hasta asegurarse de haber logrado un secado total.

### CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 3 (tres) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, conexiones incorrectas, uso en distintas condiciones a las descriptas en éste manual o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparación bajo garantía se deberá presentar éste certificado debidamente completado, junto a la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora: .....

Fecha: .....

Firma: ..... Aclaración: .....

## INSTRUCCIONES DE USO

- A. Con agua:
1. Mantener el colchón en forma vertical y llenar con agua a través de la boquilla hasta llegar al nivel "FLUID LEVEL". Tapar la boquilla.
  2. Colocar el colchón en forma horizontal sobre un colchón de goma espuma tradicional en la cama. Abrir el pico de inflado de aire, quitar todo el aire sobrante del colchón, por ejemplo, deslizando sobre la superficie un palo de escobillón. Una vez que haya eliminado todo el aire cerrar el pico de inflado.
  3. Comprimir la boquilla de llenado y el pico de inflado hacia adentro, para que toda la superficie del colchón sea uniforme.
- B. Con gel:
1. Mantener el colchón en forma vertical y llenar con agua a través de la boquilla hasta llegar al nivel "FLUID LEVEL".
  2. Añadir al agua la cantidad correcta de gel granulado y tapar la boquilla. Dejar transcurrir 4 horas antes de usar, este tiempo permite la activación total del gel.
  3. Colocar el colchón en forma horizontal sobre un colchón de goma espuma tradicional en la cama. Abrir el pico de inflado de aire, quitar todo el aire sobrante del colchón, por ejemplo, deslizando sobre la superficie un palo de escobillón. Una vez que haya eliminado todo el aire cerrar el pico de inflado.
  4. Comprimir la boquilla de llenado y el pico de inflado hacia adentro, para que toda la superficie del colchón sea uniforme.
- C. Con aire:
1. Inflar el colchón a través del pico de inflado de aire hasta que las puntas del colchón estén firmes y extendidas. Si nota que las puntas comienzan a enrollarse hacia adentro es un signo de que el colchón está demasiado inflado. Si esto ocurre desinflar levemente hasta que las puntas queden firmes y extendidas.
  2. Comprimir la boquilla de llenado y el pico de inflado hacia adentro, para que toda la superficie del colchón sea uniforme.
  2. Colocar el colchón en forma horizontal sobre un colchón de goma espuma tradicional en la cama.

## ADVERTENCIAS

- Lea detenidamente todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto.
- Acostarse suavemente y rotar cuidadosamente. Una rotación brusca puede provocar la rotura de una de las soldaduras del colchón.
- Peso máximo sugerido de 80 Kg para el colchón.

## MANTENIMIENTO

- Nunca limpiar con productos abrasivos, amoníacos, lavandinas o diluyentes.
- En caso de haber mojado el producto, secar completamente con un paño suave y seco lo antes posible hasta asegurarse de haber logrado un secado total.

### CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 3 (tres) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, conexiones incorrectas, uso en distintas condiciones a las descriptas en éste manual o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparación bajo garantía se deberá presentar éste certificado debidamente completado, junto a la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora: .....

Fecha: .....

Firma: ..... Aclaración: .....