




## ARNES PARA USO GENERAL

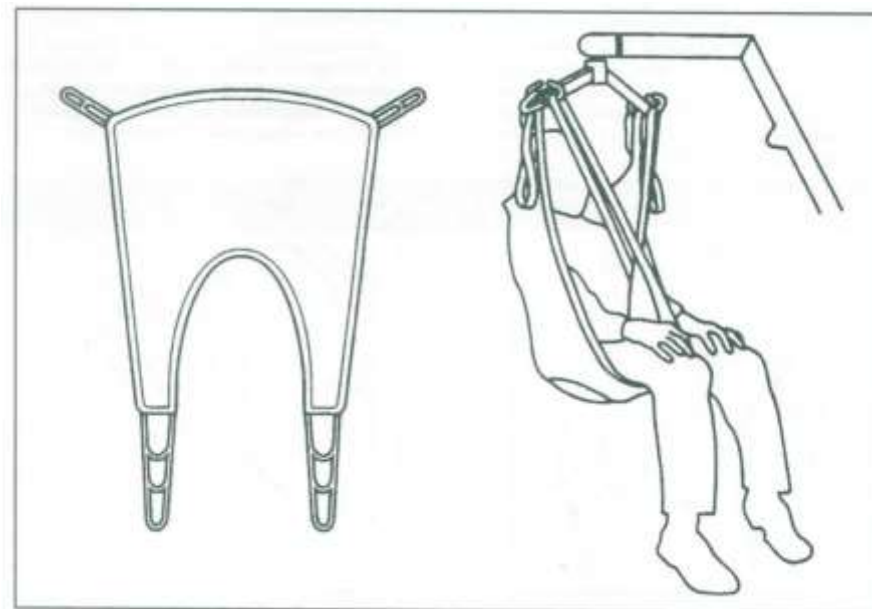

### OTRA INFORMACION:

**Fabricante: Target Medical S.A.**  
La Horqueta 1124, B1842BLF Monte Grande,  
Provincia de Buenos Aires, Argentina

**Director Técnico:**  
**Ing. Eduardo Daniel Hurden, Matricula 4899**

**Códigos K174 / K175 / K176**

**Garantía 1 año**

**Vida útil 2 años**

**93008 Emisión 2 04/2016**

## MANUAL DE USO

### INTRODUCCION

Los arneses para uso general **Care-Quip Argentina** han sido diseñados para el traslado de aproximadamente un 85 % de pacientes con dificultades de movilidad. Aptos para el uso diario y una colocación sencilla.

Los mismos están fabricados en tela y correas reforzadas para un usuario individual de hasta 150 kg. Disponible en tres talles: Pequeño, Mediano y Grande.

El uso adecuado dará como resultado un producto duradero, manteniendo una buena relación de precioralidad.

Es fundamental leer y entender todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto. El uso incorrecto podría perjudicar al mismo, al usuario y/o a terceros.

Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

### ADVERTENCIAS

Leer detenidamente todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el arnés.

Utilizar el arnés siempre según las indicaciones y tener presente los riesgos de lesiones hacia el usuario y hacia otras personas.

Respetar el peso máximo admitido y no sobrecargar el arnés.

Ubicar siempre las correas más largas en las piernas y las correas más cortas en los hombros.

Asegurar que la cabeza del paciente este sostenida en todo momento

Todos nuestros arneses son aptos para el uso con el levanta-paciente **Care-Quip Argentina**.

Para solucionar necesidades especiales consulte con su casa vendedora.

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

El talle de cada arnés se identifica por el color del ribete alrededor del arnés.

CODIGO	COLOR DEL RIBETE	TALLE	MEDIDA A (mm)	MEDIDA B (mm)	MEDIDA C (mm)
K174	Rojo	Pequeño	735	550	1010
K175	Amarillo	Mediano	850	620	1070
K176	Verde	Grande	1020	720	1180



**POSICIONES ALTERNATIVAS DE SENTADO**



Para mayor comodidad del paciente, pasar cada correa larga por debajo de ambas piernas y engancharlas sin cruzar al levanta-pacientes. (como muestra la figura)




Para mayor reclinación del paciente, enganchar las correas de los hombros en el punto más extenso de la correa y/o enganchar las correas de las piernas en alguno de los puntos más cortos. (como muestra la figura)

**MANTENIMIENTO**

Limpiar el arnés con agua y jabón neutro.

No utilizar cepillos, esponjas abrasivas o limpiadores químicos.

De no utilizar el arnés por un largo período de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.

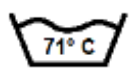

Temperatura máxima de agua indicada es 71°C.



No utilizar cloro ni lavandina.



No planchar.



Secar a la sombra.



No secar en máquina ni centrifugar

**COLOCACION DEL ARNES**

**COMO COLOCAR EL ARNES CON EL PACIENTE SENTADO**



Paso 1 - Deslizar el arnés por detrás de la espalda y asegurarse de que las correas cortas se encuentren a ambos costados del paciente, dejando la abertura sanitaria a la altura de la cintura. El arnés debe quedar nivelado con los hombros.



Paso 2 - Levantar la pierna del paciente, pasar la correa larga por debajo de la pierna y levantarla entre las piernas. Asegurarse que la tela del arnés no esté doblada o arrugada debajo del muslo. Repetir este procedimiento con la otra correa.




Paso 3 - Cruzar las correas largas y enganchar los puntos más extensos de las correas en los ganchos delanteros del levanta-pacientes.




Paso 4 - Enganchar los puntos más cortos de las correas de los hombros en los ganchos traseros del levanta-pacientes. Luego se puede comenzar a elevar el levanta-pacientes.

**COMO COLOCAR EL ARNES CON EL PACIENTE ACOSTADO**

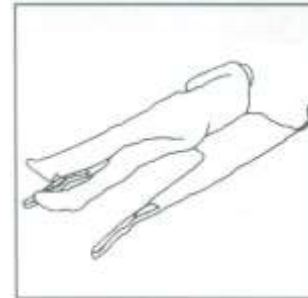

Ubicar al paciente sobre el arnés, asegurarse que la abertura sanitaria quede a la altura de la cintura.

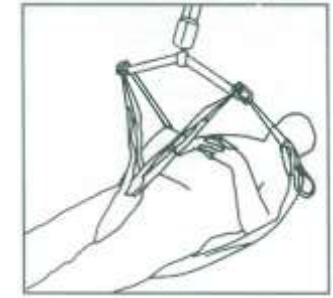

Pasar y cruzar las correas largas entre las piernas. Enganchar los puntos más extensos de las correas en los ganchos delanteros del levanta-pacientes. Enganchar los puntos más cortos de las correas de los hombros en los ganchos traseros del levanta-pacientes. Luego se puede comenzar a elevar el levanta-pacientes.

**CERTIFICADO DE GARANTIA**

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, conexiones incorrectas, uso en distintas condiciones a las descritas en este manual o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparación bajo garantía se deberá presentar este certificado debidamente completado, junto a la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora: .....

Fecha: .....

Firma: ..... Aclaración: .....