



ASIENTOS PARA DUCHA

OTRA INFORMACION:

Importador: Target Medical S.A.

La Horqueta 1124, B1842BLF Monte Grande, Buenos Aires, Argentina

Director Técnico:

Ing. Eduardo Daniel Hurden, Matricula 4899

Fabricante: Shenzhen Otto Medical Co., Ltd.

3L Qihang Business Building, Shenfeng Road, Liuyue, Henggang, Longgang, Shenzhen, China

Códigos D100 / D101 / D104 / D105 / D161

Garantía 1 año

Vida útil 2 años



D100



D101



D104



D105



D161

MANUAL DE USO

INTRODUCCION

Los asientos para ducha **Care-Quip Argentina** están diseñados para facilitar el lavado e higienizado diario de usuarios que presentan problemas de movilidad. Proveen soporte y estabilidad adicional a las personas y ayudan a evitar posibles accidentes en el baño. Los mismos han sido diseñados para un usuario individual de hasta 100 Kg. La gama de asientos está compuesta por los siguientes códigos:

- D100 – Banqueta para ducha.
- D101 – Banqueta plegable para ducha
- D104 – Silla para ducha con respaldo
- D105 – Banco de transferencia para ducha
- D161 – Asiento giratorio para bañera

El uso adecuado dará como resultado un producto duradero, manteniendo una buena relación de precio-calidad.

Es fundamental leer y entender todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto.

El uso incorrecto del producto podría perjudicar al mismo, al usuario y/o terceros.

Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de utilizar los asientos para ducha, en los códigos que corresponda regular la altura de las cuatro patas. La altura correcta de la asiento para ducha permite que el usuario conserve una postura segura al sentarse.

Es importante que al sentarse y al levantarse el usuario sea asistido por un tercero o mediante barras de sujeción instaladas en el baño para evitar posibles accidentes.

• AL SENTARSE

Posicionarse frente el asiento para ducha.

Girar 180° hasta tocar el asiento para ducha con la parte posterior de las piernas.

Inclinarse hacia adelante y sentarse lentamente.

• AL LEVANTARSE

Inclinarse hacia adelante y levantarse lentamente.

ADVERTENCIAS

- Lea detenidamente todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el asiento para ducha.
- No utilice el asiento para otro uso que no sea el de sentar, lavar e higienizar al usuario.
- Respete el peso máximo admitido del asiento para ducha.
- Es importante que el asiento para ducha sea inspeccionado regularmente en busca de cualquier defecto que ponga en riesgo la seguridad del usuario.
- Ajuste las uniones del asiento para ducha si estuvieran flojas.

- Cambie los regatones antideslizantes de las patas si estuvieran flojos, gastados o dañados.
- No utilice el asiento para ducha si los agujeros en las zonas de ajuste estuvieran elongados, o si alguna de las patas estuviera doblada o quebrada.

MANTENIMIENTO

- Secar completamente el asiento para ducha con un paño suave después de cada utilización.
- Nunca limpiar el asiento para ducha con productos abrasivos, amoniacos, lavandinas o diluyentes.
- Es importante que el asiento para ducha sea inspeccionado regularmente, y asegurarse que:
 - Las uniones del asiento para ducha no estén flojas.
 - Las patas no estén dobladas, ni quebradas.
 - Los agujeros en la zona de ajuste de las patas no estén elongados.
 - Los regatones no estén flojos, rotos o gastados.
- En caso de no utilizar el asiento para ducha por un largo período de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (DOCE) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, uso en distintas condiciones a las descritas en éste manual, o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparación bajo garantía, se deberá presentar con la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora:

Fecha:

Firma: **Aclaración:**