



CANADIENSES Y MULETAS



MANUAL DE USO

OTRA INFORMACION:

Importador: Target Medical S.A.

La Horqueta 1124, B1842BLF Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, Argentina

Director Técnico:

Ing. Eduardo Daniel Hurden, Matricula 4899

Fabricante: Foshan Dongfang Medical Equipment Manufacturing Ltd.

N 1 Puland Road, Foshan City, Guangdong Province 528000, China

PM-1813-4

**Códigos C323 / C333 / C353 / C409 / C410 / C411 / C412 /
C413 / 421 / C422 / C423**

Garantía 1 año

Vida útil 2 años

93018 Emisión 2 04/2016



CANADIENSES Y MULETAS



MANUAL DE USO

OTRA INFORMACION:

Importador: Target Medical S.A.

La Horqueta 1124, B1842BLF Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, Argentina

Director Técnico:

Ing. Eduardo Daniel Hurden, Matricula 4899

Fabricante: Foshan Dongfang Medical Equipment Manufacturing Ltd.

N 1 Puland Road, Foshan City, Guangdong Province 528000, China

PM-1813-4

**Códigos C323 / C333 / C353 / C409 / C410 / C411 / C412 /
C413 / 421 / C422 / C423**

Garantía 1 año

Vida útil 2 años

93018 Emisión 2 04/2016

INTRODUCCION

Los canadienses y muletas **Care-Quip Argentina** han sido diseñados para ayudar en la movilidad de un usuario individual y son aptos para el uso diario. El uso adecuado dará como resultado un producto duradero, manteniendo una buena relación de precio-calidad, ofreciendo confort y versatilidad al usuario para la solución de problemas de movilidad. Es fundamental leer y entender todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto. El uso incorrecto del producto podría perjudicar al mismo, al usuario y/o terceros. Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

INSTRUCCIONES DE USO

Altura: La altura correcta permite que el usuario conserve una postura erecta con su codo ligeramente flexionado. Así, el peso del cuerpo descansa sobre la axilera y la empuñadura. Es importante que el producto tenga la medida correcta y siempre se utilice un par idéntico de igual altura.

Uso

Cuando la pierna NO puede soportar peso, mantener la pierna afectada levantada levemente del suelo, hacia delante y con la rodilla levemente flexionada. Mover primero el producto hacia delante luego mover el cuerpo, permitiendo que la presión oscile hacia delante.

Cuando la pierna puede soportar peso parcial, mover primero el producto hacia delante. Segundo posicionar la pierna afectada junto al producto soportando parte del peso del cuerpo y luego dar un paso con la pierna sana.

Para subir escalones, subir primero el producto seguida por la pierna sana y luego por la pierna afectada hasta el mismo escalón. Luego repita la operación.

Para bajar escalones, bajar primero el producto seguida por la pierna afectada y luego por la pierna sana hasta el mismo escalón. Luego repita la operación.

Para levantarse, generar presión sobre el producto y sobre el apoyabrazos opuesto de la silla para incorporarse. Una vez parado, asegurarse de que su brazo calce dentro del brazaletes o axilera.

Para sentarse, girar sobre sí mismo hasta tocar la silla con la parte posterior de las piernas, quitar ambos brazos de los productos y sostener los productos con una mano, apoyar la mano disponible en el apoyabrazos de la silla, inclinarse hacia adelante y sentarse lentamente.

ADVERTENCIAS

- Lea detenidamente todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto.
- Este producto debe ser chequeado regularmente en busca de cualquier defecto que ponga en riesgo la seguridad del usuario.
- Si los agujeros en la zona de ajuste están elongados o la pata está quebrada, no usar el producto.
- Si el regatón está gastado, debe cambiarlo.
- El uso en días de lluvia debe hacerse con máximo cuidado para evitar caídas.

MANTENIMIENTO

- Limpiar el producto por lo menos una vez por semana, con un paño suave y húmedo, quitando el polvo que pueda estar acumulado.
- Nunca limpiar con productos abrasivos, amoníacos, lavandinas o diluyentes.
- En caso de haber mojado el producto, secar completamente con un paño suave y seco lo antes posible y dejar en un lugar cálido y seco, hasta asegurarse de haber logrado un secado total.
- En caso de no utilizar el producto por un largo período de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.
- Los regatones son vulnerables al desgaste. Se recomienda su reemplazo para evitar cualquier tipo de accidente.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material de la misma.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, conexiones incorrectas, uso en distintas condiciones a las descriptas en éste manual o reparaciones por personal no autorizado. En caso de requerir reparación bajo garantía se deberá presentar éste certificado debidamente completado, junto a la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora:

Fecha:

Firma: Aclaración:

INTRODUCCION

Los canadienses y muletas **Care-Quip Argentina** han sido diseñados para ayudar en la movilidad de un usuario individual y son aptos para el uso diario. El uso adecuado dará como resultado un producto duradero, manteniendo una buena relación de precio-calidad, ofreciendo confort y versatilidad al usuario para la solución de problemas de movilidad. Es fundamental leer y entender todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto. El uso incorrecto del producto podría perjudicar al mismo, al usuario y/o terceros. Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

INSTRUCCIONES DE USO

Altura: La altura correcta permite que el usuario conserve una postura erecta con su codo ligeramente flexionado. Así, el peso del cuerpo descansa sobre la axilera y la empuñadura. Es importante que el producto tenga la medida correcta y siempre se utilice un par idéntico de igual altura.

Uso

Cuando la pierna NO puede soportar peso, mantener la pierna afectada levantada levemente del suelo, hacia delante y con la rodilla levemente flexionada. Mover primero el producto hacia delante luego mover el cuerpo, permitiendo que la presión oscile hacia delante.

Cuando la pierna puede soportar peso parcial, mover primero el producto hacia delante. Segundo posicionar la pierna afectada junto al producto soportando parte del peso del cuerpo y luego dar un paso con la pierna sana.

Para subir escalones, subir primero el producto seguida por la pierna sana y luego por la pierna afectada hasta el mismo escalón. Luego repita la operación.

Para bajar escalones, bajar primero el producto seguida por la pierna afectada y luego por la pierna sana hasta el mismo escalón. Luego repita la operación.

Para levantarse, generar presión sobre el producto y sobre el apoyabrazos opuesto de la silla para incorporarse. Una vez parado, asegurarse de que su brazo calce dentro del brazaletes o axilera.

Para sentarse, girar sobre sí mismo hasta tocar la silla con la parte posterior de las piernas, quitar ambos brazos de los productos y sostener los productos con una mano, apoyar la mano disponible en el apoyabrazos de la silla, inclinarse hacia adelante y sentarse lentamente.

ADVERTENCIAS

- Lea detenidamente todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto.
- Este producto debe ser chequeado regularmente en busca de cualquier defecto que ponga en riesgo la seguridad del usuario.
- Si los agujeros en la zona de ajuste están elongados o la pata está quebrada, no usar el producto.
- Si el regatón está gastado, debe cambiarlo.
- El uso en días de lluvia debe hacerse con máximo cuidado para evitar caídas.

MANTENIMIENTO

- Limpiar el producto por lo menos una vez por semana, con un paño suave y húmedo, quitando el polvo que pueda estar acumulado.
- Nunca limpiar con productos abrasivos, amoníacos, lavandinas o diluyentes.
- En caso de haber mojado el producto, secar completamente con un paño suave y seco lo antes posible y dejar en un lugar cálido y seco, hasta asegurarse de haber logrado un secado total.
- En caso de no utilizar el producto por un largo período de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.
- Los regatones son vulnerables al desgaste. Se recomienda su reemplazo para evitar cualquier tipo de accidente.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material de la misma.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, conexiones incorrectas, uso en distintas condiciones a las descriptas en éste manual o reparaciones por personal no autorizado. En caso de requerir reparación bajo garantía se deberá presentar éste certificado debidamente completado, junto a la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora:

Fecha:

Firma: Aclaración: