



ASIENTOS ELEVADOS PARA INODOROS

OTRA INFORMACION:

Importador: Target Medical S.A.

La Horqueta 1124, B1842BLF Monte Grande, Buenos Aires, Argentina

Director Técnico:

Ing. Eduardo Daniel Hurden, Matricula 4899

Fabricante: Shenzhen Otto Medical Co., Ltd.

3L Qihang Business Building, Shenfeng Road, Liuyue, Henggang, Longgang,
Shenzhen, China

Códigos D201 / D202 / D203 / D204

Garantía 1 año

Vida útil 2 años



MANUAL DE USO

INTRODUCCION

Los asientos elevados para inodoros **Care-Quip Argentina** han sido diseñados como ayuda técnica para facilitar el uso del inodoro por personas con movilidad reducida para pararse y sentarse. Proveen soporte y estabilidad adicional a las personas y ayudan a evitar posibles accidentes en el baño. Los mismos han sido diseñados para un usuario individual de hasta 120 Kg. La gama de asientos está compuesta por los siguientes códigos:

- D201 - Asiento elevado de 5 cm para inodoros.
- D202 - Asiento elevado de 10 cm para inodoros.
- D203 - Asiento elevado de 15 cm para inodoros
- D204 - Asiento elevado de 10 cm para inodoros con manijas.

El uso adecuado dará como resultado un producto duradero, manteniendo una buena relación de precio-calidad.

Es fundamental leer y entender todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto.

El uso incorrecto del producto podría perjudicar al mismo, al usuario y/o terceros.

Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Diseño en monopieza totalmente sellado. El material resistente y su forma anatómica aseguran una gran durabilidad y confort. Se puede fijar fácilmente, de forma segura y estable en cualquier tipo de inodoro mediante las trabas. El montaje es sencillo, rápido y no requiere herramientas.

ADVERTENCIAS

- Leer detenidamente todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el asiento elevado.
- Respetar el peso máximo admitido del asiento elevado.
- Es importante que el asiento elevado sea inspeccionado regularmente en busca de cualquier defecto que ponga en riesgo la seguridad del usuario.
- Usuarios con limitaciones físicas deben ser supervisados o asistidos para usar el asiento elevado.
- Al estar sentado sobre el asiento elevado el usuario debe centrar su peso. Si el peso es recargado sobre la parte de enfrente o en uno de los lados el asiento elevable para inodoros puede inclinarse.

INSTALACION

No usar herramientas, apretar las perillas de ajuste solamente con la mano. No apretar las las perillas de ajuste en exceso, ya que la rosca del asiento elevado para inodoro puede dañarse.

Notas:

- El asiento y la tapa existentes en el inodoro pueden ser dejados en su posición levantada o pueden ser removidos.
- El asiento elevado posee en la parte inferior un borde sobresaliente al marco del agujero, el cual debe quedar adentro del inodoro.
- Si posee un tipo de inodoro al que el asiento elevado no se ajusta adecuadamente, asegurarse de que esta correctamente instalado o es recomendable suspender su uso.
- Si la parte trasera del asiento elevado golpea la tapa y asiento del inodoro debe quitarlos de este para una instalación apropiada.
- El asiento elevado no tiene por objeto la instalación permanente en el inodoro. La unidad debe ser controlada una vez por semana para garantizar que la instalación es adecuada para su uso.

D201, D202 Y D203

1. Colocar las trabas con perillas de ajuste en el asiento elevado.
2. Colocar el asiento elevado sobre el inodoro. Las trabas deben quedar por fuera del inodoro. Mover el asiento elevado para centrar, enderezar y encontrar la posición más firme.
3. Ajustar las perillas de ajuste para que las trabas queden firmes y no se deslicen.
4. Comprobar que quedo bien instalado, moviendo el asiento elevable y confirmando que este quedo firme en la posición colocada.

D204

1. Colocar las manijas hasta el fondo de los orificios en el asiento elevado.
2. Colocar las arandelas y tonillos para la fijación de las manijas.
3. Colocar el asiento elevado sobre el inodoro. La traba debe quedar por dentro del inodoro. Mover el asiento elevado para centrar, enderezar y encontrar la posición más firme.
4. Ajustar la perilla de ajuste para que la traba quede firme y no se deslice.
5. Comprobar que quedo bien instalado, moviendo el asiento elevable y confirmando que este quedo firme en la posición colocada.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de usar el asiento elevado, asegurarse siempre de que esté apropiadamente instalado, asegurado y en su respectiva posición. Asegurarse de que la/s traba/s que fijan el asiento elevado para inodoro estén apretadas.

Es importante que al sentarse y al levantarse el usuario se ayude de las manijas si corresponde o mediante la ayuda de un tercero o mediante barras de sujeción instaladas en el baño para evitar posibles accidentes.

- **AL SENTARSE**
Posicionarse frente al inodoro.
Girar 180° hasta tocar el inodoro y asiento elevable con la parte posterior de las piernas.
Inclinarse hacia adelante y sentarse lentamente.
- **AL LEVANTARSE**
Inclinarse hacia adelante y levantarse lentamente.

MANTENIMIENTO

Instrucciones de limpieza

- Enjuagar con agua tibia y secar con un paño suave.
- Nunca limpiar el asiento elevado con productos abrasivos, amoniacos, lavandinas o diluyentes.
- Es importante que el asiento elevado sea inspeccionado regularmente.
- En caso de no utilizar el asiento elevado por un largo período de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (DOCE) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, uso en distintas condiciones a las descritas en éste manual, o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparación bajo garantía, se deberá presentar con la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora:

Fecha:

Firma: **Aclaración:**