

# ALCANZADOR DE OBJETOS



H422



H425

## MANUAL DE USO

### OTRA INFORMACION:

**Importador: Target Medical S.A.**

La Horqueta 1124, Monte Grande, 1842  
Buenos Aires, Argentina.

**Director Técnico:**

Ing. Eduardo Daniel Hurden, Matricula 4899

**Fabricante: Ningbo Eackon Machinery Co. Ltd.**

288 Tongning Road, Ningbo, China.

**Garantía 1 año**

**Vida útil 2 años**

93071 Emisión 1 10/2017

### INTRODUCCION

Los alcanzadores de objetos **Care-Quip Argentina** están diseñados para facilitar agarrar objetos fuera de su alcance por personas que presentan problemas de movilidad sin la necesidad de hacer movimientos como levantarse y/o agacharse.

- H422: Alcanzador de objetos, ultraliviano, largo: 83cm.
- H425: Alcanzador de objetos, plegable, ultraliviano, largo: 67cm.

El uso adecuado dará como resultado un producto duradero, manteniendo una buena relación de precio-calidad.

Es fundamental leer y entender todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto.

El uso incorrecto del producto podría perjudicar al mismo, al usuario y/o terceros.

Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

### DATOS TECNICOS

- Fabricado en aluminio ligero y resistente.
- Con mandíbula dentada que agarra y sujeta objetos de forma segura.
- Se opera a través de un gatillo.
- Incluye imán para levantar pequeños objetos metálicos y gancho para descolgar objetos.

### MANTENIMIENTO

- Limpiar periódicamente con un paño suave y húmedo, quitando el polvo que pueda estar acumulado.
- Nunca limpiar con productos abrasivos, amoníacos, lavandinas o diluyentes.
- En caso de haber mojado, secar completamente con un paño suave lo antes posible y dejar en un lugar cálido y seco, hasta asegurarse de haber logrado un secado total.
- En caso de no utilizar por un largo período de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.

### CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, uso en distintas condiciones a las descriptas en éste manual o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparación bajo garantía se deberá presentar éste certificado debidamente completado, junto a la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora: .....

Fecha: .....

Firma: ..... Aclaración: .....