



RESPALDOS POSTURALES JAY

OTRA INFORMACION:

Importador: Target Medical S.A.
La Horqueta 1124, B1842BLF Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, Argentina

Director Técnico:
Ing. Eduardo Daniel Hurden, Matricula 4899

PM-1813-22

Fabricante:
Sunrise Medical Inc. (Mobility Products Division)
2842 Business Park Avenue, Fresno, CA 92154, Estados Unidos

Sunrise Medical Inc. (Mobility Products Division)
7477 East Dry Creek Parkway, Longmont, Co 80503, Estados Unidos

Sunrise Medical Technologies S.A. de C.V.
Privada Misiones # 10, Tijuana 22575, México

Garantía 1 año

Vida útil 2 años

93037 Emisión 2 04/2016



MANUAL DE USO

INTRODUCCION

Los respaldos posturales Jay3 están diseñados para ofrecer soporte al usuario manteniéndolo estable y funcional, aumentando así la tolerancia del usuario a la sedestación prolongada. Además es ligero, duradero, de fácil utilización y diseño elegante. Los respaldos sirven para sustituir el tapizado de respaldo de las sillas de ruedas. Este es compatible con la mayoría de las sillas de ruedas. No debe utilizarse en sillas de ruedas que sean reclinables en un ángulo mayor de 60°. La capacidad máxima de peso del usuario que soporta es de 136 kg.

Otorga los siguientes beneficios clínicos:

- Provee soporte postural firme para óptimo alineamiento y posicionamiento en sedestación.
- Mejora la estabilidad necesaria para una óptima funcionalidad.
- Mejora la función respiratoria, la deglución y el campo visual del usuario.
- Previene deformidades musculoesqueléticas y sus correspondientes cirugías.
- Regulariza el tono muscular en pacientes espásticos y/o hipertónicos.
- En pacientes pediátricos, promueve el desarrollo motor, cognitivo y el aprendizaje.
- Mejora la distribución de la presión preservando la integridad de la piel.

Es fundamental leer y entender todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el respaldo. El uso incorrecto del respaldo podría perjudicar al mismo, al usuario y/o a terceros.

Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

PRESENTACION

La presentación del respaldo es individual, embalada dentro de una caja de cartón, incluye:

- Respaldo postural
- Cuñas lumbosacras X 2
- Anclajes extensibles X 2
- Llave fija de 10 mm
- Llave Allen de 4 mm
- Manual de usuario

ADVERTENCIAS

- Leer detenidamente todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el respaldo.
- No utilizar el ancho del asiento de la silla de ruedas como guía para determinar el ancho apropiado del respaldo. Una elección inadecuada del respaldo podría ser perjudicial para el desempeño de la función del mismo.
- No utilizar el respaldo para empujar o levantar la silla de ruedas. El uso inapropiado podría provocar que el respaldo se desprenda inesperadamente de la silla de ruedas.
- No utilizar la manija del respaldo para levantar la silla de ruedas. Esta manija sólo está diseñada para la extracción del respaldo.
- No utilizar el respaldo en sillas reclinables con un ángulo mayor a 60°. El uso en sillas reclinables puede causar que el respaldo se suelte accidentalmente de la silla, provocando una caída y una posible lesión.
- Al instalar el respaldo en una silla de ruedas, se podría afectar el centro de gravedad de la misma y podría provocar que la silla de ruedas se vuelque así atrás, causando lesiones graves. Evaluar siempre la necesidad de instalar las ruedas antivuelco o abrazaderas que adapten el eje para pacientes amputados para aumentar la estabilidad y evitar accidentes.
- No dejar el respaldo en exteriores o a la intemperie.
- Evitar utilizar el respaldo en sillas con tapizado de asiento que se encuentre estirado. El tapizado estirado no proporciona un soporte adecuado y puede provocar un posicionamiento inapropiado. Reemplazar el tapizado de asiento.
- Evitar utilizar el tapizado del respaldo si está estirado. El tapizado estirado no proporciona un soporte adecuado para el cuerpo y puede provocar un posicionamiento inapropiado. Reemplace el tapizado o adquiera el respaldo Jay.

PRECAUCIONES

Antes de sentarse en las sillas de ruedas se deberá comprobar la correcta instalación del respaldo. Al acoplar el respaldo en los anclajes se oír un “clic” confirmando que el mismo ha quedado bien colocado. Si no está seguro de haber oído el “clic”, tire hacia arriba desde la manija del respaldo para asegurarse que el mismo ha quedado acoplado correctamente.

MANTENIMIENTO

La limpieza y el mantenimiento periódico pueden ayudar a prolongar la vida útil del respaldo postural. Se recomienda inspeccionar los componentes durante la limpieza para comprobar si hay desgastes o desajustes en los componentes del respaldo. Las piezas rotas y/o desgastadas deben ser sustituidas y las piezas desajustadas deben volver a ajustarse.

No continuar utilizando el respaldo al identificar componentes rotos o desajustados.

- Limpieza de la funda

Retirar la funda despegando el Velcro. Separar la funda de la estructura del respaldo. Localizar el cierre de la parte inferior de la funda y abrirlo. Retirar la espuma y dar vuelta la funda. Cerrar la cremallera de la funda y evitar que se enganche. Lavar la funda en lavarropas o a mano con agua caliente y secar en secarropas de bajo calor o al sol.

No utilizar cloro.

No planchar.

No lavar las fundas en tintorerías, ni utilizar lavarropas y/o secarropas industriales.

- Limpieza de la estructura del respaldo

Limpia suavemente la estructura con un paño húmedo con agua y jabón. Secar suavemente con un paño limpio. Dejar secar completamente antes de su ensamblado.

La estructura del respaldo no requiere ningún otro mantenimiento.

- Limpieza de los componentes de posicionamiento.

Limpia suavemente los componentes con agua y jabón. Secar suavemente con un paño limpio. Dejar secar completamente antes de su ensamblado.

No sumergir los componentes de posicionamiento en ningún líquido.

- Ensamblado del respaldo luego de su limpieza.

Seguir las instrucciones de limpieza y mantenimiento, luego ensamblar de la siguiente manera:

Colocar la espuma dentro de la funda. Tener en cuenta que la base contiene dos capas de espuma. Al volver a colocar la espuma, comprobar que la capa más delgada de color gris quede orientada hacia la estructura del respaldo. Una vez que esté perfectamente colocado dentro de la funda, cerrar la cremallera. Colocar la funda en la estructura y pegar los Velcros para finalizar.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Seleccionar el respaldo según medida antropométrica del usuario. Retirar el tapizado del respaldo original instalado en la silla. Colocar los anclajes provistos en los tubos del respaldo. Colocar el respaldo en los anclajes.

Los ajustes de altura, profundidad y ángulo del respaldo se pueden llevar a cabo con el usuario sentado en la silla a fin de obtener la mayor comodidad. Todos estos ajustes pueden realizarse utilizando únicamente las 2 herramientas incluidas (una llave Allen y una llave fija).

CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, conexiones incorrectas, uso en distintas condiciones a las descritas en éste manual o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparación bajo garantía se deberá presentar éste certificado debidamente completado, junto a la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora:

Fecha:

Firma: Aclaración: