



CAMA ORTOPEDICA MANUAL



OTRA INFORMACION:

Distribuidor: Target Medical S.A.

La Horqueta 1124, B1842BLF Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, Argentina

Director Técnico:

Ing. José Longo, Matrícula 43485

Fabricante: Astralmedica

Irigoyen 127, La Tablada, Provincia de Buenos Aires, Argentina

PM-1764-2

Garantía 1 año

Vida útil 2 años

93038 Emisión 2 04/2016

MANUAL DE USO

INTRODUCCION

La cama ortopédica manual está diseñada para la comodidad de un usuario individual de hasta 140 kg de peso, ofreciendo regulación de ángulo de respaldo y regulación de ángulo de rodilla. Además, la cama es desmontable para su fácil traslado, incluso por lugares de difícil acceso.

La cama ortopédica manual es apta para uso diario en ambientes secos.

Los accesorios adicionales para un adecuado uso de la cama deben ser adquiridos por separado. Los mismos son:

- Barandas
- Trapecio
- Colchón ortopédico de alta densidad
- Mesa para cama

El uso adecuado dará como resultado un producto duradero, manteniendo una buena relación de precio-calidad y ofreciendo confort y versatilidad al usuario y a su cuidador.

Es fundamental leer y entender todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar la cama ortopédica manual. El uso incorrecto podría perjudicar a la misma, al usuario y/o a terceros.

Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su proveedor.

ADVERTENCIAS

- Leer atentamente el manual de usuario antes de usar la cama ortopédica manual.
- Conservar siempre este manual.
- No utilizar la cama ortopédica manual para otro uso que no sea el previsto por el fabricante.
- Al armar, regular y desarmar la cama, prestar atención para no sufrir accidentes y/o lesiones.
- Verificar siempre antes de utilizar la cama que la estructura está correctamente ensamblada con la cabecera y piecera.
- Comprobar que la cama haya quedado sobre una superficie plana y segura.
- Colocar los accesorios de forma correcta.
- Al utilizar la cama ortopédica manual siempre tener presente los riesgos de lesiones hacia el usuario, cuidador y otras personas.
- Avisar al paciente cada vez que se realice una regulación de la cama.
- Mantener debidamente ajustadas las sábanas, ropa de cama, catéteres, cables de equipamientos, etc. para que los mismos no se enganchen con las partes móviles de la cama.
- Mantener la cama a una distancia mayor de 30 cm de cualquier fuente directa de calor.
- La cama ortopédica manual es para el uso de un solo paciente.

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA CAMA ORTOPEDICA MANUAL

- Estructura desmontable con lechos superior e inferior, apta para masajes cardiacos. Fabricada en acero con terminación epoxi color beige.
- Cabecera y piecera desmontables, revestidos con melamina.
- Movimientos de los lechos superior e inferior mediante manivelas.
- Peso máximo sugerido del paciente 140 kg.
- Largo de la cama 200 cm
- Ancho de la cama 95 cm

USO DE LA CAMA ORTOPEDICA MANUAL

Las regulaciones de ángulo de rodilla y de ángulo de respaldo se realizan mediante manivelas.

A través de ambas manivelas podrá alcanzar la posición deseada de los lechos de la cama ortopédica manual. De esta forma obtendrá el máximo confort del paciente y la óptima comodidad de trabajo para el profesional.

Por medio de la manivela derecha podrá elevar y descender el lecho superior hasta la posición deseada.

A través de la manivela izquierda podrá elevar y descender el lecho inferior hasta la posición deseada.

PRESENTACION

La presentación de la cama ortopédica manual es individual, embalada en cajas que incluyen:

Cabecera (más alta)	X 1
Pieceras (más baja)	X 1
Estructura con lechos	X 1
Manual de uso	X 1



ARMADO DE LA CAMA ORTOPEDICA MANUAL

El lugar donde se colocara la cama debe disponer de un piso firme, horizontal y liso.

1. Sacar todas las piezas y componentes de las cajas para su identificación.
2. No destruir los embalajes hasta asegurarse que todo esté en orden.
3. Acercar la cabecera a la parte superior de la estructura de la cama.
4. Con una mano sujetar e inclinar la cabecera y con la otra levantar la estructura hasta enganchar los pernos en las ranuras correspondientes (como muestra la foto). Se aconseja tomar la estructura por los costados para no atrapar sus manos entre la estructura y la cabecera o piecera. Por esto, es recomendable realizar estas operaciones entre dos personas.
5. Repetir la misma operación para enganchar la piecera al otro extremo de la estructura.
6. Colocar los accesorios adicionales que haya adquirido.



MANTENIMIENTO

- Inspeccionar en búsqueda de cualquier desperfecto que pudiera comprometer la integridad de la cama ortopédica manual y su correcto funcionamiento. No se necesita ninguna operación con tiempos prefijados.
- Operar las manivelas de la cama ortopédica manual para asegurarse que funcionen correctamente.
- La lubricación periódica de las piezas móviles extenderá la vida útil de la cama ortopédica manual. Utilizar lubricante en aerosol y limpiar cualquier exceso del mismo, caso contrario, se fomentará la acumulación de polvo en ésta zona.
- En caso de no utilizar la cama ortopédica manual por un largo periodo de tiempo, la cama se podrá desarmar para su fácil almacenamiento.
- Almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.

Para una vida útil más larga de la cama ortopédica manual es importante realizar periódicamente una limpieza general. La periodicidad de la limpieza debe ser de al menos cada quince días. Se sugiere realizarla de la siguiente manera:

- Limpiar periódicamente la cama ortopédica manual con un paño suave o una esponja humedecida en agua y detergente inocuo, para quitar el polvo que pueda estar acumulado en la estructura de la misma.
- Secar completamente.
- Nunca limpiar la cama ortopédica manual con diluyentes, solventes o abrasivos, aun cuando se tenga que eliminar una mancha difícil.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, conexiones incorrectas, uso en distintas condiciones a las descritas en éste manual o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparación bajo garantía se deberá presentar éste certificado debidamente completado, junto a la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora:

Fecha:

Firma: Aclaración: