



## ANDADORES

### OTRA INFORMACION:

**Fabricante: Target Medical S.A.**

La Horqueta 1124, B1842BLF Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, Argentina

**Director Técnico:**

**Ing. Eduardo Daniel Hurden, Matricula 4899**

**PM-1813-8**

**Códigos C510 / C512 / C513 / C542 / C572P**

**Garantía 1 año**

**Vida útil 2 años**

**93006 Emisión 2 04/2016**



## MANUAL DE USO

## INTRODUCCION

Los andadores Care-Quip Argentina han sido diseñados para proporcionar soporte y estabilidad en la bipedestación de personas con movilidad reducida. Aptos para el uso diario de un usuario individual. El uso adecuado dará como resultado un producto duradero, manteniendo una buena relación de precio-calidad, ofreciendo confort y versatilidad al usuario para la solución de problemas de movilidad.

Es fundamental leer y entender todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto.

El uso incorrecto del producto podría perjudicar al mismo, al usuario y/o terceros.

Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

## ADVERTENCIAS

- Leer detenidamente todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el andador.
- Al utilizar el andador siempre tener presente los riesgos de lesiones hacia uno mismo y hacia otras personas.
- El andador es un soporte adicional, no debe utilizarse para otro fin que no sea éste.
- El andador debe estar plenamente abierto antes de su uso.
- El andador no se debe usar para subir o bajar escaleras.
- Es importante que el andador sea inspeccionado regularmente en busca de cualquier defecto.
- Ajustar las uniones del andador si estuvieran flojas.
- Cambiar los regatones si estuvieran flojos, gastados o dañados.
- No utilizar el andador si los agujeros en las zonas de ajuste estuvieran elongados, o si alguna de las patas estuviera doblada o quebrada.

## CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS ANDADORES

| Especificaciones Técnicas<br>Tipo y Códigos | Material de fabricación | Terminación | Color    | Regulación de altura (cm) | Ancho total (cm) | Otras especificaciones  |
|---|-------------------------|-------------|----------|---------------------------|------------------|---|
| Andador fijo C510                           | Aluminio ultraliviano   | Anodizado   | Natural  | 60 a 67                   | 56               | • Regatones antideslizante  |
| Andador fijo C512                           | Aluminio ultraliviano   | Anodizado   | Natural  | 74 a 86                   | 58               | • Regatones antideslizante  |
| Andador fijo C513                           | Aluminio ultraliviano   | Anodizado   | Natural  | 82 a 94                   | 59               | • Regatones antideslizante  |
| Andador plegable C542                       | Aluminio ultraliviano   | Anodizado   | Plateado | 79 a 83                   | 28               | • Fácil plegado<br>• Ambidiestro<br>• Regatones antideslizantes   |
| Andador plegable articulado C572P           | Aluminio ultraliviano   | Anodizado   | Plateado | 80 a 98                   | 60               | • Fácil plegado<br>• Permite movimiento paso a paso<br>• Regatones antideslizantes<br>• Permite el uso de ruedas como accesorio |

## PRESENTACION

La presentación del andador es individual.

## ARMADO Y PLEGADO

### CODIGO C542

- ARMADO: Tome el andador y ábralo desplazando la planchuela hacia abajo hasta que haga tope con el travesaño.
- PLEGADO: Tome el andador y ciérrelo desplazando la planchuela hacia arriba.

### CODIGOS C572P

- ARMADO: Tome el andador de las empuñaduras y ábralo desplazando de las mismas hacia a fuera hasta oír un click generado por el botón de traba.
- PLEGADO: Oprima el botón de traba ubicado en el centro del travesaño superior. Tome de las empuñaduras y ciérrelo de las mismas hacia adentro hasta su plegado total.

## USO DEL ANDADOR

Antes de utilizar el andador, regule la altura por medio de las trabas ubicadas en las patas. La altura óptima permite que el usuario conserve una postura erecta con sus codos ligeramente flexionados. De esta manera el peso del cuerpo descansa sobre el andador al caminar.

- AL LEVANTARSE  
Coloque el andador frente a usted.  
Incorpórese inclinándose hacia adelante con ambas manos en las empuñaduras del andador.
- AL CAMINAR  
Posicione el andador un paso más adelante.  
Dé un paso con una de sus piernas, si tuviera una pierna afectada primero con ésta, y luego dé un paso con la otra. En el C542, utilice el andador con la mano del lado afectado.  
Cuando haya ganado confianza con el uso del mismo, levante y avance con el andador en tramos cortos. Si el andador posee ruedas, simplemente empújelo.
- AL SENTARSE  
Posiciónese frente al asiento.  
Gire 180° hasta tocar el asiento con la parte posterior de las piernas.  
Inclínese hacia adelante y siéntese lentamente.

## MANTENIMIENTO

- Limpiar periódicamente el andador con un paño suave o una esponja humedecida en agua y detergente inocuo, para quitar el polvo que pueda estar acumulando en la estructura del mismo.
- Nunca limpiar el andador con productos abrasivos, amoníacos, lavandinas o diluyentes.
- Es importante que el andador sea inspeccionado regularmente, y asegurarse que:
  - Las uniones del andador no estén flojas.
  - Las patas no estén dobladas, ni quebradas.
  - Las empuñaduras del andador no estén dañadas o rajadas.
  - Los agujeros en la zona de ajuste no estén elongados.
  - Los regatones no estén flojos, rotos o gastados.
- En caso de no utilizar el andador por un largo periodo de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material de la misma.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, conexiones incorrectas, uso en distintas condiciones a las descritas en éste manual o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparación bajo garantía se deberá presentar éste certificado debidamente completado, junto a la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora: .....

Fecha: .....

Firma: ..... Aclaración: .....