



COLCHON DE AIRE CON COMPRESOR



MANUAL DE USO

OTRA INFORMACION:

Importador: Target Medical S.A.

La Horqueta 1124, B1842BLF Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, Argentina

Director Técnico:

Ing. Eduardo Daniel Hurden, Matricula 4899

PM-1813-6

Fabricante:

Fabricante: Pe & Le Enterprise Ltd.

16-5 266, Sec 1 Wunhua 2nd Road, Linkou Township, Taipei County 24448, Taiwan.

Códigos F141 / F142 / F143 / F144 / F151

Garantía

Colchoneta 3 meses

Compresor 1 año

Vida útil

Colchoneta 6 meses

Compresor 2 años

93026 Emisión 3 06/2017



COLCHON DE AIRE CON COMPRESOR



MANUAL DE USO

OTRA INFORMACION:

Importador: Target Medical S.A.

La Horqueta 1124, B1842BLF Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, Argentina

Director Técnico:

Ing. Eduardo Daniel Hurden, Matricula 4899

PM-1813-6

Fabricante:

Fabricante: Pe & Le Enterprise Ltd.

16-5 266, Sec 1 Wunhua 2nd Road, Linkou Township, Taipei County 24448, Taiwan.

Códigos F141 / F142 / F143 / F144 / F151

Garantía

Colchoneta 3 meses

Compresor 1 año

Vida útil

Colchoneta 6 meses

Compresor 2 años

93026 Emisión 3 06/2017

INSTRUCCIONES DE USO

1. Extender la colchoneta de PVC sobre cualquier colchón tradicional, ortopédico o de goma espuma. Se aconseja que los picos de la colchoneta queden ubicados en la zona de los pies y en contacto con el colchón.
2. Conectar las mangueras a los picos de la colchoneta y del compresor.
3. Doblar las solapas de la colchoneta que se encuentran en ambos extremos por debajo del colchón para evitar que se desplace.
4. Enchufar el cable del compresor en un toma corriente de 220V y pulsar la tecla para poner en funcionamiento el mismo. El compresor comenzará a inflar la colchoneta lentamente y luego de 25 minutos la colchoneta estará completamente inflada.
5. Colocar sábanas sobre la colchoneta para hacer la cama.
6. Acostar al paciente.

NOTAS:

- El compresor inflará secuencialmente cada circuito de la colchoneta cada 5 minutos generando que cambien los puntos de apoyo. Al mejorar la irrigación sanguínea se evita la aparición o mejora el estado de las úlceras por decúbito. Por lo cual no es necesaria la rotación constante del paciente pero es aconsejable rotarlo las veces que sea necesario.
- El compresor debe permanecer en funcionamiento todo el tiempo. Esto NO afecta su funcionamiento. Su consumo eléctrico es muy bajo y no requiere lubricación.
- Si su modelo de compresor posee perilla de regulación, podrá disminuir o aumentar la presión de aire dependiendo del peso del paciente o para mejorar su confort.

ADVERTENCIAS

- Lea detenidamente todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizarlo.
- Tocar el enchufe o él toma corriente con las manos mojadas puede provocar shock eléctrico.
- No conectar el compresor en un toma corriente que presente varios enchufes o algún desperfecto.
- Si el enchufe o cable están dañados deberán ser reemplazados por personal especializado.
- No desconectar el compresor tirando del cable de electricidad.
- El compresor y la colchoneta son aptos solamente para uso interior.
- Un ambiente sucio puede bajar la vida útil del compresor.
- No colocar objetos ni elementos filosos sobre la colchoneta.
- Acostar y rotar al paciente con movimientos bruscos pueden provocar la rotura de la colchoneta.
- Peso máximo sugerido de 100 Kg para el colchón.



MANTENIMIENTO

- Desenchufar el cable del compresor del toma corriente.
- Limpiar el producto con un paño suave y húmedo, quitando el polvo que pueda estar acumulado.
- En caso de mucha suciedad, usar detergentes suaves para la limpieza. Nunca limpiar con productos abrasivos, amoníacos, lavandinas o diluyentes.
- En caso de haber mojado el producto, secar completamente con un paño suave y seco lo antes posible hasta asegurarse de haber logrado un secado total.
- En caso de no utilizar el producto por un largo período de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de la colchoneta por el término de 3 (tres) meses y del compresor por el término de 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material de los mismos.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, conexiones incorrectas, uso en distintas condiciones a las descritas en éste manual o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparación bajo garantía se deberá presentar éste certificado debidamente completado, junto a la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora:

Fecha:

Firma: Aclaración:

INSTRUCCIONES DE USO

1. Extender la colchoneta de PVC sobre cualquier colchón tradicional, ortopédico o de goma espuma. Se aconseja que los picos de la colchoneta queden ubicados en la zona de los pies y en contacto con el colchón.
2. Conectar las mangueras a los picos de la colchoneta y del compresor.
3. Doblar las solapas de la colchoneta que se encuentran en ambos extremos por debajo del colchón para evitar que se desplace.
4. Enchufar el cable del compresor en un toma corriente de 220V y pulsar la tecla para poner en funcionamiento el mismo. El compresor comenzará a inflar la colchoneta lentamente y luego de 25 minutos la colchoneta estará completamente inflada.
5. Colocar sábanas sobre la colchoneta para hacer la cama.
6. Acostar al paciente.

NOTAS:

- El compresor inflará secuencialmente cada circuito de la colchoneta cada 5 minutos generando que cambien los puntos de apoyo. Al mejorar la irrigación sanguínea se evita la aparición o mejora el estado de las úlceras por decúbito. Por lo cual no es necesaria la rotación constante del paciente pero es aconsejable rotarlo las veces que sea necesario.
- El compresor debe permanecer en funcionamiento todo el tiempo. Esto NO afecta su funcionamiento. Su consumo eléctrico es muy bajo y no requiere lubricación.
- Si su modelo de compresor posee perilla de regulación, podrá disminuir o aumentar la presión de aire dependiendo del peso del paciente o para mejorar su confort.

ADVERTENCIAS

- Lea detenidamente todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizarlo.
- Tocar el enchufe o él toma corriente con las manos mojadas puede provocar shock eléctrico.
- No conectar el compresor en un toma corriente que presente varios enchufes o algún desperfecto.
- Si el enchufe o cable están dañados deberán ser reemplazados por personal especializado.
- No desconectar el compresor tirando del cable de electricidad.
- El compresor y la colchoneta son aptos solamente para uso interior.
- Un ambiente sucio puede bajar la vida útil del compresor.
- No colocar objetos ni elementos filosos sobre la colchoneta.
- Acostar y rotar al paciente con movimientos bruscos pueden provocar la rotura de la colchoneta.
- Peso máximo sugerido de 100 Kg para el colchón.



MANTENIMIENTO

- Desenchufar el cable del compresor del toma corriente.
- Limpiar el producto con un paño suave y húmedo, quitando el polvo que pueda estar acumulado.
- En caso de mucha suciedad, usar detergentes suaves para la limpieza. Nunca limpiar con productos abrasivos, amoníacos, lavandinas o diluyentes.
- En caso de haber mojado el producto, secar completamente con un paño suave y seco lo antes posible hasta asegurarse de haber logrado un secado total.
- En caso de no utilizar el producto por un largo período de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de la colchoneta por el término de 3 (tres) meses y del compresor por el término de 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material de los mismos.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, conexiones incorrectas, uso en distintas condiciones a las descritas en éste manual o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparación bajo garantía se deberá presentar éste certificado debidamente completado, junto a la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora:

Fecha:

Firma: Aclaración: