



MESAS PARA CAMA

OTRA INFORMACION:

Importador: Target Medical S.A.

La Horqueta 1124, B1842BLF Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, Argentina

Director Técnico:

Ing. Eduardo Daniel Hurden, Matricula 4899

Fabricante:

Apex Health Care Manufacturing Inc.

20 Industrial 3rd Road, Tou Chiao Industrial Park, Ming Hsiung Shiang,
Chia-Yi Hsien, Taiwán

Códigos I121 / I131

Garantía 1 año

Vida útil 2 años

93028 Emisión 2 04/2016



I121

I131

MANUAL DE USO

INTRODUCCION

Las mesas para cama **Care-Quip Argentina** están diseñadas para brindar comodidad al paciente en cama, facilitando la alimentación, lectura y demás actividades, manteniendo objetos personales al alcance de su mano y evitando posibles accidentes. La tabla de la mesa es regulable tanto en altura como en inclinación.

Es fundamental leer y entender todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar la silla de ruedas con bacinilla para ducha. El uso incorrecto de la silla podría perjudicar a la misma, al usuario y/o a terceros.

Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

ADVERTENCIAS

- Leer detenidamente todo el contenido de este manual de uso antes de utilizar la mesa para cama.
- No utilizar la mesa para cama para otro uso que no sea el de brindar comodidad al paciente en cama, facilitando la alimentación, lectura y demás actividades, manteniendo objetos personales al alcance de su mano.
- Asegurarse que todos los tornillos estén ajustados antes de utilizar la mesa para cama.
- Asegurarse que las perillas de regulación de altura y de inclinación estén bien ajustadas luego de adoptar la posición deseada de la tabla. Caso contrario, alimentos calientes u objetos personales podrían caer sobre el paciente provocando lesiones.
- Es importante que la mesa sea inspeccionada regularmente en busca de cualquier defecto.
- Cambiar las ruedas si estuvieran gastadas o dañadas.
- No utilizar la mesa, si alguno de los tubos de la estructura estuvieran doblados o quebrados.
- No exponer la mesa al calor directo.

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS MESAS PARA CAMA

- Estructura inferior de acero pintado
- Estructura superior de acero pintado
- Cuatro ruedas plásticas dobles
- Tabla en melanina con tapacantos plásticos y dos bordes antideslizantes
- Tabla regulable en inclinación
- Tabla regulable en altura: 72 a 115 cm

Código I121:

- Medidas de la tabla: 60,4 X 38,5 X 1,8 cm
- Peso total: 7 kg

Código I131:

- Medidas de las tablas: 60,4 X 38,5 X 1,8 cm
20,3 X 38,5 X 1,8 cm
- Peso total: 9,2 kg

PRESENTACION

La presentación de la mesa para cama es individual, embalada en una caja de cartón, que incluye:

Tubo de acero pintado con 2 ruedas giratorias	X 2
Columna de acero pintado	X 1
Columna de acero cromado	X 1
Tabla de mesa de 60,4 X 38,5 X 1,8 cm	X 1
Tornillo con rosca	X 2
Arandela	X 2
Perilla de ajuste con rosca macho	X 1
Perrilla de ajuste con rosca hembra	X 1
Llave Allen	X 1
Manual de uso	X 1

- Componentes adicionales del código I131
Tabla de mesa de 20,3 X 38,5 X 1,8 cm X 1
Tornillo para madera X 4

ARMADO DE LA MESA PARA CAMA

- No destruir los embalajes hasta asegurarse que todo esté en orden.
- Fijar los tubos con ruedas giratorias a la columna de acero pintado mediante los tornillos de rosca provistos.
- Insertar la columna de acero cromado dentro de la columna de acero pintado, y colocar la perilla de ajuste para la regulación en altura.
- En el código I131, fijar la tabla más pequeña a la estructura mediante los cuatros tornillos para madera provistos.
- Insertar la tabla en el tubo de la estructura de acero cromado.
- Inclinarse la tabla de la mesa hasta la posición deseada y ajustar la perilla.

USO DE LA MESA PARA CAMA

Posicionar la mesa cerca de la cama.

Regular la altura de la tabla mediante la perilla.

Regular la inclinación de la tabla mediante la perilla, dependiendo de la actividad que vaya a realizar el paciente.

Asegurarse que las perillas estén bien ajustadas antes de cada uso.

MANTENIMIENTO

- Limpiar periódicamente la mesa para cama con un paño suave o una esponja ligeramente humedecida en agua y detergente inocuo, para quitar el polvo que pueda estar acumulado en la misma.
- Nunca limpiar la mesa para cama con productos abrasivos, amoníacos, lavandinas o diluyentes.
- Es importante que la mesa sea inspeccionada regularmente, y asegurarse que:
 - Las uniones de la mesa no estén flojas.
 - Los tubos de la estructura no estén doblados, ni quebrados.
 - Las ruedas no estén flojas, gastadas o dañadas.
- Todos los tornillos y perillas deben estar ajustados al momento de utilizar la mesa.
- En caso de no utilizar la mesa por un largo período de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (meses) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, conexiones incorrectas, uso en distintas condiciones a las descritas en éste manual o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparación bajo garantía se deberá presentar éste certificado debidamente completado, junto a la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora:

Fecha:

Firma: **Aclaración:**