



EQUIPO PARA TRACCION CERVICAL

OTRA INFORMACION:

Importador: Target Medical S.A.

La Horqueta 1124, Monte Grande 1842, Provincia de Buenos Aires, Argentina

Director Técnico:

Ing. Eduardo Daniel Hurden, Matricula 4899

Fabricante: Apex Health Care Manufacturing Inc.

20 Industrial 3rd Road, Tou Chiao Industrial Park, Ming Hsiung Shiang,
Chia-Yi Hsien, Taiwán

Código M281

Garantía 1 año

Vida útil 2 años



MANUAL DE USO


INTRODUCCION

El equipo para tracción cervical **Care-Quip Argentina** ha sido diseñado para la ejercitación de la columna vertebral y es apto para el uso diario. El uso adecuado dará como resultado un producto duradero, manteniendo una buena relación de precivalidad, ofreciendo confort y versatilidad al usuario para la solución de problemas de movilidad. Es fundamental leer y entender todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto.

El uso incorrecto del producto podría perjudicar al mismo, al usuario y/o terceros.

Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

ARMADO

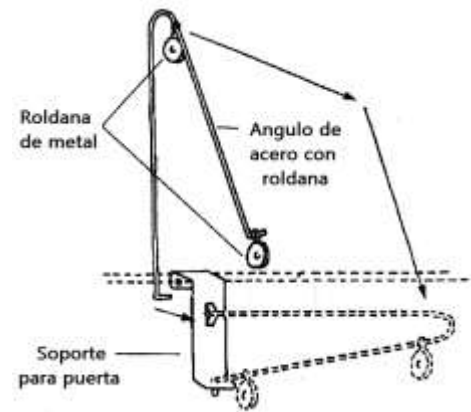

Paso 1: Enganchar el ángulo de acero con roldana en el soporte para puerta, según la imagen.

Paso 2: Enganchar el soporte en una puerta abierta.

Paso 3: Cerrar la puerta o fijarla con una traba para que no se mueva.

Paso 4: Pasar cordón por las roldanas.


Paso 5: Atar un extremo del cordón en el soporta arnés para cabeza.

Paso 6: Llenar la bolsa con la cantidad de agua requerida.

Paso 7: Atar el otro extremo del cordón en el gancho de la bolsa.

Paso 8: Colocarse el arnés en la cabeza de la siguiente forma:

- Tomar el arnés de las hebillas de metal (E) con una mano para colgarlo como se muestra en la imagen.
- Introducir la cabeza por el centro del arnés y apoyar el mentón (B) y la nuca/cuello (A) en las correas que corresponde como muestra la imagen.
- Colocar las tiras con abrojo (C) en el velcro en la correa del apoya mentón (B).
- Ajustar el largo de la correa del arnés mediante las hebillas de metal (E) para la mejor sujeción de la cabeza.

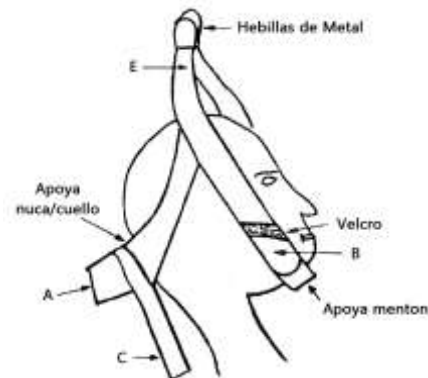

Nota: Puede requerir ayuda de otra persona.

Paso 9: Enganchar las hebillas del arnés para cabeza en el soporta arnés.

ADVERTENCIAS

- Lea detenidamente todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto.
- Este producto debe ser chequeado regularmente en busca de cualquier defecto que ponga en riesgo la seguridad del usuario.

MANTENIMIENTO

- Limpiar el producto por lo menos una vez por semana, con un paño suave y húmedo, quitando el polvo que pueda estar acumulado.
- Limpiar el arnés con agua y jabón neutro. No utilizar cepillos, esponjas abrasivas o limpiadores químicos.



Temperatura máxima de agua indicada es 71°C.



No utilizar cloro ni lavandina.



No planchar.



Secar a la sombra.



No secar en máquina ni centrifugar

- Nunca limpiar con productos abrasivos, amoníacos, lavandinas o diluyentes.
- En caso de haber mojado el producto, secar completamente con un paño suave y seco lo antes posible y dejar en un lugar cálido y seco, hasta asegurarse de haber logrado un secado total.
- En caso de no utilizar el producto por un largo período de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, conexiones incorrectas, uso en distintas condiciones a las descritas en éste manual o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparación bajo garantía se deberá presentar éste certificado debidamente completado, junto a la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora:

Fecha:

Firma: Aclaración: