

INTRODUCCION

El portasuero y portatubo de oxígeno **Care-Quip Argentina** han sido diseñados como accesorios de las sillas de ruedas de acero para colgar soluciones o colocar tanques de oxígeno. El uso adecuado dará como resultado un producto duradero, ofreciendo confort y versatilidad al usuario de la silla de ruedas.

Es fundamental leer y entender el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto.

El uso incorrecto del producto podría perjudicar al mismo, al usuario y/o terceros.

Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

INSTALACION

1. Retirar el producto de los envoltorios.
2. Leer atentamente las instrucciones antes de realizar la instalación.
3. Quitar el tope plástico trasero del caño inferior de la silla de ruedas.
4. Colocar el producto en el caño inferior de hasta la posición deseada.

Notas:

- En caso del portasuero, se debe retirar en primer lugar un tornillo del respaldo y luego volver a colocarlo haciendo coincidir el mismo con la chaveta metálica del producto.
- En caso del portaoxígeno, se debe retirar la tuerca del tornillo lateral del producto, y hacer coincidir este con el caño lateral del cuerpo de la silla, luego ajustar nuevamente el tornillo.

7. Colocar nuevamente el tope plástico trasero del caño inferior de la silla de ruedas.

8. Comprobar la correcta instalación y confirmar su firmeza.

Notas:

- En caso del portasuero, se debe aflojar la perilla de ajuste para regular la altura.
- En caso del portaoxígeno, se debe aflojar la perilla de ajuste para colocar el tanque de oxígeno.

ADVERTENCIA

Antes de usar el producto, asegurarse siempre de que esté apropiadamente instalado, asegurado y en su correcta posición. Asegurarse de que no falte ninguna tuerca y que este puesto el tope plástico trasero del caño inferior de la silla.

MANTENIMIENTO

- Limpiar el producto por lo menos una vez por semana, con un paño suave y húmedo, quitando el polvo que pueda estar acumulado.
- Nunca limpiar con productos abrasivos, amoniacos, lavandinas o diluyentes.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, conexiones incorrectas, uso en distintas condiciones a las descritas en este manual o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparaciones bajo garantía se deberá presentar este certificado debidamente completado, junto a la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora:.....

Fecha:.....

Firma:..... Aclaración:.....



PORTASUERO Y PORTAOXIGENO PARA SILLAS DE RUEDAS DE ACERO



MANUAL DE USO

OTRA INFORMACION:

Importador: Target Medical S.A

La Horqueta 1124, Monte Grande 1842, Provincia de Buenos Aires, Argentina

Director Técnico:

Ing. Eduardo Daniel Huden, Matrícula 4899

Fabricante: R.Poon Medical Products (Mingguang) Co.,Ltd.

Quicang Road 116, 239400 Mingguang, Anhui Province 52800, R.O.C.,
China

Códigos: A722 / A755

Garantía 1 año

Vida útil 2 años

93055 Emisión 1 04/2016

INTRODUCCION

El portasuero y portatubo de oxígeno **Care-Quip Argentina** han sido diseñados como accesorios de las sillas de ruedas de acero para colgar soluciones o colocar tanques de oxígeno. El uso adecuado dará como resultado un producto duradero, ofreciendo confort y versatilidad al usuario de la silla de ruedas. Es fundamental leer y entender el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto. El uso incorrecto del producto podría perjudicar al mismo, al usuario y/o terceros. Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

INSTALACION

1. Retirar el producto de los envoltorios.
2. Leer atentamente las instrucciones antes de realizar la instalación.
3. Quitar el tope plástico trasero del caño inferior de la silla de ruedas.
4. Colocar el producto en el caño inferior de hasta la posición deseada.

Notas:

- En caso del portasuero, se debe retirar en primer lugar un tornillo del respaldo y luego volver a colocarlo haciendo coincidir el mismo con la chaveta metálica del producto.
- En caso del portaoxígeno, se debe retirar la tuerca del tornillo lateral del producto, y hacer coincidir este con el caño lateral del cuerpo de la silla, luego ajustar nuevamente el tornillo.

7. Colocar nuevamente el tope plástico trasero del caño inferior de la silla de ruedas.
8. Comprobar la correcta instalación y confirmar su firmeza.

Notas:

- En caso del portasuero, se debe aflojar la perilla de ajuste para regular la altura.
- En caso del portaoxígeno, se debe aflojar la perilla de ajuste para colocar el tanque de oxígeno.

ADVERTENCIA

Antes de usar el producto, asegurarse siempre de que esté apropiadamente instalado, asegurado y en su correcta posición. Asegurarse de que no falte ninguna tuerca y que este puesto el tope plástico trasero del caño inferior de la silla.

MANTENIMIENTO

- Limpiar el producto por lo menos una vez por semana, con un paño suave y húmedo, quitando el polvo que pueda estar acumulado.
- Nunca limpiar con productos abrasivos, amoniacos, lavandinas o diluyentes.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, conexiones incorrectas, uso en distintas condiciones a las descritas en este manual o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparaciones bajo garantía se deberá presentar este certificado debidamente completado, junto a la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora:.....

Fecha:.....

Firma:..... Aclaración:.....



PORTASUERO Y PORTAOXIGENO PARA SILLAS DE RUEDAS DE ACERO



MANUAL DE USO

OTRA INFORMACION:

Importador: Target Medical S.A

La Horqueta 1124, Monte Grande 1842, Provincia de Buenos Aires, Argentina

Director Técnico:

Ing. Eduardo Daniel Huden, Matricula 4899

Fabricante: R.Poon Medical Products (Mingguang) Co.,Ltd.

Quicang Road 116, 239400 Mingguang, Anhui Province 52800, R.O.C.,
China

Códigos: A722 / A755

Garantía 1 año

Vida útil 2 años

93055 Emisión 1 04/2016