



## INODORO DE ALUMINIO CON RUEDAS, APOYABRAZOS Y APOYAPIES DESMONTABLES



### MANUAL DE USO

#### OTRA INFORMACION:

**Importador: Target Medical S.A.**

La Horqueta 1124, B1842BLF Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, Argentina

**Director Técnico:**

**Ing. Eduardo Daniel Hurden, Matricula 4899**

**Fabricante: Jianlian Home Care Products Co Ltd**

Xiebian Industrial Park Dali, NanHai District, Foshan City GuangDong Province, China

**Códigos D337**

**Garantía 1 año**

**Vida útil 2 años**

93082 Emisión 1 11/2018



## INODORO DE ALUMINIO CON RUEDAS, APOYABRAZOS Y APOYAPIES DESMONTABLES



### MANUAL DE USO

#### OTRA INFORMACION:

**Importador: Target Medical S.A.**

La Horqueta 1124, B1842BLF Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, Argentina

**Director Técnico:**

**Ing. Eduardo Daniel Hurden, Matricula 4899**

**Fabricante: Jianlian Home Care Products Co Ltd**

Xiebian Industrial Park Dali, NanHai District, Foshan City GuangDong Province, China

**Códigos D337**

**Garantía 1 año**

**Vida útil 2 años**

93082 Emisión 1 11/2018

## INTRODUCCION

El inodoro de aluminio con ruedas, apoyabrazos y apoyapies desmontables **Care-Quip Argentina** ha sido diseñado como ayuda técnica para facilitar el lavado, el higienizado y el uso sanitario de personas con movilidad reducida. Además provee soporte y estabilidad adicional ayudando a evitar posibles accidentes. El mismo ha sido diseñado para un usuario individual de hasta 110 kg. El inodoro es apto para uso diario en baños y habitaciones. El uso adecuado dará como resultado un producto duradero, manteniendo una buena relación de precio-calidad y ofreciendo confort y versatilidad al usuario.

Es fundamental leer y entender todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el inodoro. El uso incorrecto del inodoro podría perjudicar al mismo, al usuario y/o a terceros.

Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

## ADVERTENCIAS

Leer detenidamente todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el inodoro.

Al utilizar el inodoro siempre tener presente los riesgos de lesiones hacia el usuario y hacia otras personas, especialmente al movilizarlo por zonas estrechas.

Al movilizar el inodoro siempre permanecer alerta, para evitar choques u otras situaciones peligrosas.

No utilizar el inodoro para otro uso que no sea el de facilitar el lavado, el higienizado y el uso sanitario del usuario.

No sobrecargar el inodoro ni transportar niños en ella. Respetar el peso máximo admitido.

Asegurarse que los frenos estén activados antes de sentar y levantar al usuario del inodoro.

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Fabricado en aluminio anodizado con tornillos de acero inoxidable.

Profundidad de asiento: 41 cm.

Ancho de asiento: 46 cm.

Ancho entre apoyabrazos: 47 cm.

Ancho total: 58 cm.

Altura de asiento: 53 cm.

Espacio libre bajo el asiento: 44 cm.

Peso total: 13,5 kg.

Totalmente resistente al agua.

Asiento robusto de poliuretano con orificio central desmontable.

Apoyabrazos rebatibles.

Apoyapies desmontables y rebatibles hacia adentro y hacia afuera. Plataforma con angulación tibio-társica.

Ruedas giratorias de 12,5 cm, traseras con frenos.

Bacinilla plástica con manija.

Peso máximo admitido del usuario 110 kg.

## USO

Comprobar que los frenos de las ruedas traseras se encuentren activados.

Para sentarse en el inodoro girar sobre sí mismo, hasta tocar el inodoro con la parte posterior de las piernas, apoyar las manos suavemente en los apoyabrazos, inclinarse hacia adelante y sentarse lentamente.

Al estar sentado en el inodoro no intentar alcanzar objetos fuera de su alcance. Estirarse solamente hasta donde lleguen los brazos sin cambiar la posición de sentado.

No trasladar el peso ni cambiar la posición de sentado ya que el inodoro podría tumbarse.

Para levantarse del inodoro inclinarse hacia adelante con ambas manos en los apoyabrazos e incorporarse lentamente.

## MANTENIMIENTO

Luego de cada lavado o higienización, secar completamente el inodoro mediante un paño suave.

Limpiar y desinfectar el inodoro por lo menos una vez por semana. Las ruedas, demás partes metálicas y plásticas pueden ser limpiadas con una esponja embebida en agua y detergente inocuo.

Nunca limpiar el inodoro con productos abrasivos, amoníacos, lavandinas o diluyentes.

Todas las tuercas y tornillos del inodoro deben estar ajustados.

Cuando estén activados los frenos de las ruedas traseras el inodoro no debe moverse.

Cuando no estén activados los frenos de las ruedas traseras el inodoro debe moverse con facilidad.

Las ruedas del inodoro son vulnerables al desgaste. Se recomienda reemplazar las cuatro ruedas al mismo tiempo para evitar que el inodoro pierda estabilidad.

En caso de no utilizar el inodoro por un largo período de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (DOCE) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo. Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, uso en distintas condiciones a las descriptas en éste manual, o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparación bajo garantía, se deberá presentar con la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora: .....

Fecha: .....

Firma: ..... Aclaración: .....

## INTRODUCCION

El inodoro de aluminio con ruedas, apoyabrazos y apoyapies desmontables **Care-Quip Argentina** ha sido diseñado como ayuda técnica para facilitar el lavado, el higienizado y el uso sanitario de personas con movilidad reducida. Además provee soporte y estabilidad adicional ayudando a evitar posibles accidentes. El mismo ha sido diseñado para un usuario individual de hasta 110 kg. El inodoro es apto para uso diario en baños y habitaciones. El uso adecuado dará como resultado un producto duradero, manteniendo una buena relación de precio-calidad y ofreciendo confort y versatilidad al usuario.

Es fundamental leer y entender todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el inodoro. El uso incorrecto del inodoro podría perjudicar al mismo, al usuario y/o a terceros.

Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

## ADVERTENCIAS

Leer detenidamente todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el inodoro.

Al utilizar el inodoro siempre tener presente los riesgos de lesiones hacia el usuario y hacia otras personas, especialmente al movilizarlo por zonas estrechas.

Al movilizar el inodoro siempre permanecer alerta, para evitar choques u otras situaciones peligrosas.

No utilizar el inodoro para otro uso que no sea el de facilitar el lavado, el higienizado y el uso sanitario del usuario.

No sobrecargar el inodoro ni transportar niños en ella. Respetar el peso máximo admitido.

Asegurarse que los frenos estén activados antes de sentar y levantar al usuario del inodoro.

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Fabricado en aluminio anodizado con tornillos de acero inoxidable.

Profundidad de asiento: 41 cm.

Ancho de asiento: 46 cm.

Ancho entre apoyabrazos: 47 cm.

Ancho total: 58 cm.

Altura de asiento: 53 cm.

Espacio libre bajo el asiento: 44 cm.

Peso total: 13,5 kg.

Totalmente resistente al agua.

Asiento robusto de poliuretano con orificio central desmontable.

Apoyabrazos rebatibles.

Apoyapies desmontables y rebatibles hacia adentro y hacia afuera. Plataforma con angulación tibio-társica.

Ruedas giratorias de 12,5 cm, traseras con frenos.

Bacinilla plástica con manija.

Peso máximo admitido del usuario 110 kg.

## USO

Comprobar que los frenos de las ruedas traseras se encuentren activados.

Para sentarse en el inodoro girar sobre sí mismo, hasta tocar el inodoro con la parte posterior de las piernas, apoyar las manos suavemente en los apoyabrazos, inclinarse hacia adelante y sentarse lentamente.

Al estar sentado en el inodoro no intentar alcanzar objetos fuera de su alcance. Estirarse solamente hasta donde lleguen los brazos sin cambiar la posición de sentado.

No trasladar el peso ni cambiar la posición de sentado ya que el inodoro podría tumbarse.

Para levantarse del inodoro inclinarse hacia adelante con ambas manos en los apoyabrazos e incorporarse lentamente.

## MANTENIMIENTO

Luego de cada lavado o higienización, secar completamente el inodoro mediante un paño suave.

Limpiar y desinfectar el inodoro por lo menos una vez por semana. Las ruedas, demás partes metálicas y plásticas pueden ser limpiadas con una esponja embebida en agua y detergente inocuo.

Nunca limpiar el inodoro con productos abrasivos, amoníacos, lavandinas o diluyentes.

Todas las tuercas y tornillos del inodoro deben estar ajustados.

Cuando estén activados los frenos de las ruedas traseras el inodoro no debe moverse.

Cuando no estén activados los frenos de las ruedas traseras el inodoro debe moverse con facilidad.

Las ruedas del inodoro son vulnerables al desgaste. Se recomienda reemplazar las cuatro ruedas al mismo tiempo para evitar que el inodoro pierda estabilidad.

En caso de no utilizar el inodoro por un largo período de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (DOCE) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo. Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, uso en distintas condiciones a las descriptas en éste manual, o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparación bajo garantía, se deberá presentar con la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora: .....

Fecha: .....

Firma: ..... Aclaración: .....