



## **INODORO DE ALUMINIO CON RUEDAS Y BACINILLA PARA LA DUCHA**

### **OTRA INFORMACION:**

**Importador: Target Medical S.A.**

La Horqueta 1124, Monte Grande 1842, Buenos Aires, Argentina

**Director Técnico:**

**Ing. Eduardo Daniel Hurden**, Matricula 4899

**Fabricante: Jianlian Home Care Products Co Ltd**

Xiebian Industrial Park Dali, NanHai District, Foshan City GuangDong  
Province, China

**Códigos D336E**

**Garantía 1 año**

**Vida útil 2 años**



93089 Emisión 1 06/2019

**MANUAL DE USO**

## INTRODUCCION

El inodoro portátil para la ducha **Care-Quip** ha sido diseñado para facilitar el lavado, el higienizado y el uso sanitario de usuarios que presentan problemas de movilidad. Además provee soporte y estabilidad adicional ayudando a evitar posibles accidentes. El mismo ha sido diseñado para un usuario individual de hasta 90 kg.

El inodoro es apto para uso diario en baños y habitaciones. El uso adecuado dará como resultado un producto duradero, manteniendo una buena relación de precio-calidad y ofreciendo confort y versatilidad al usuario para la solución de problemas de movilidad.

Es fundamental leer y entender todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el inodoro. El uso incorrecto podría perjudicar al mismo, al usuario y/o a terceros.

Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

## ADVERTENCIAS

Leer detenidamente todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el inodoro.

Al utilizarlo siempre tener presente los riesgos de lesiones hacia el usuario y hacia otras personas, especialmente al movilizarlo por zonas estrechas.

Al movilizar el inodoro siempre permanecer alerta, para evitar choques u otras situaciones peligrosas.

No utilizar el inodoro para otro uso que no sea el de facilitar el lavado, el higienizado y el uso sanitario del usuario.

No sobrecargar el inodoro ni transportar niños en ella. Respetar el peso máximo admitido.

No permitir que los niños jueguen con el inodoro o se cuelguen del mismo.

Asegurarse que los frenos estén activados antes de sentar y levantar al usuario del inodoro portátil.

## CARACTERISTICAS TECNICAS

- Estructura de aluminio anodizado
- Tornillos de acero inoxidable
- Ancho de asiento: 43 cm
- Profundidad de asiento: 44 cm
- Altura de asiento: 52 cm
- Espacio libre bajo el asiento: 42 cm
- Ancho entre apoyabrazos: 44 cm
- Ancho total: 55 cm
- Peso total: 6 kg
- Asiento acolchado rebatible y desmontable
- Funda de respaldo lavable
- Totalmente resistente al agua
- Ruedas giratorias de 10 cm, traseras con frenos
- Bacinilla plástica con manija y tapa
- Peso máximo admitido del usuario 90 kg

## PRESENTACION

La presentación es individual, embalado en una caja de cartón, que incluye:

Estructura lateral izquierda	X 1
Estructura lateral derecha	X 1
Asiento acolchado	X 1
Caño transversal delantero	X 1
Caño transversal trasero	X 1
Caño de respaldo con funda	X 1
Tornillo largo	X 4
Tornillo corto	X 10
Tuerca	X 14
Arandela	X 14
Varilla curva	X 2
Bacinilla con manija y tapa	X 1
Juego de llaves	X 1
Manual de uso	X 1


## ARMADO

Sacar todas las piezas y componentes de la caja para su identificación.


No destruir los embalajes hasta asegurarse que todo esté en orden.

Ensamblar las estructuras laterales al caño transversal delantero mediante los tornillos largos, arandelas y tuercas, como muestra la foto.

Se recomienda no ajustar firmemente los tornillos, a las tuercas durante el armado del inodoro.

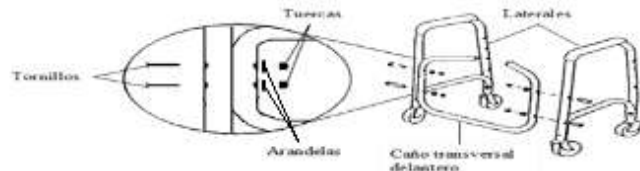

Ensamblar el caño transversal trasero a los laterales mediante los tornillos cortos, arandelas y tuercas, como muestra la foto.

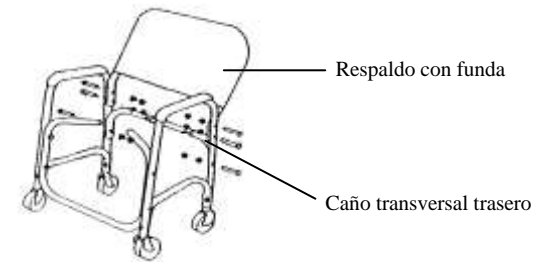


Ensamblar el respaldo con funda a los laterales, mediante los tornillos cortos, arandelas y tuercas, como muestra la foto.

Colocar las varillas curvas por debajo del caño transversal delantero y del caño transversal trasero mediante los tornillos cortos, arandelas y tuercas, como muestra la foto.

Colocar la bacinilla sobre las varillas curvas.

Colocar el asiento y trabar mediante los clips.

**Luego del ensamble total, ajustar firmemente todos los tornillos a las tuercas de todo el inodoro.**

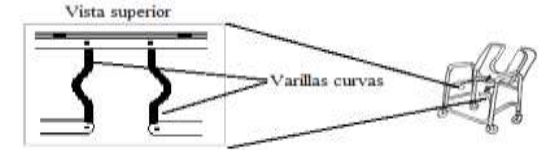

## USO

Rebatir hacia atrás el asiento para colocar la bacinilla con o sin tapa según cómo se usará el inodoro.

Comprobar que los frenos de las ruedas traseras se encuentren activados.

Al sentarse en el inodoro girar sobre sí mismo, hasta tocar el inodoro con la parte posterior de las piernas, apoyar las manos suavemente en los apoyabrazos, inclinarse hacia adelante y sentarse lentamente.

Al estar sentado en el inodoro no intentar alcanzar objetos fuera de su alcance. Estirarse solamente hasta donde lleguen los brazos sin cambiar la posición de sentado.

No trasladar el peso ni cambiar la posición de sentado por cuanto el inodoro podría tumbarse.

Al levantarse del inodoro inclinarse hacia adelante con ambas manos en los apoyabrazos e incorporarse lentamente.

## MANTENIMIENTO

Luego de cada lavado o higienización del usuario, secar completamente el inodoro mediante un paño suave.

Limpiar y desinfectar el inodoro por lo menos una vez por semana. Las ruedas, demás partes metálicas y plásticas pueden ser limpiadas con una esponja embebida en agua y detergente inocuo.

Nunca limpiar el inodoro con productos abrasivos, amoníacos, lavandinas o diluyentes.

Todas las tuercas y tornillos del inodoro deben estar ajustados.

Cuando estén activados los frenos de las ruedas traseras el inodoro no debe moverse.

Cuando no estén activados los frenos de las ruedas traseras el inodoro debe moverse con facilidad.

Las ruedas del inodoro son vulnerables al desgaste. Se recomienda reemplazar las cuatro ruedas al mismo tiempo para evitar que el inodoro pierda estabilidad.

Inspeccionar el tapizado del asiento y la funda del respaldo regularmente. Si hubiera rajaduras se recomienda reemplazar inmediatamente, para mantener el confort y la estética.

En caso de no utilizar el inodoro por un largo período de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (DOCE) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo. Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, uso en distintas condiciones a las descriptas en éste manual, o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparación bajo garantía, se deberá presentar con la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora: .....

Fecha: .....

Firma: ..... Aclaración: .....