



BASTONES DE MADERA



MANUAL DE USO

OTRA INFORMACION:

Importador: Target Medical S.A.

La Horqueta 1124, B1842BLF Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, Argentina

Director Técnico:

Ing. Eduardo Daniel Hurden, Matricula 4899

Fabricante:

Wooden Art Enterprise Co., Ltd.

3 F. No. 104, Chi Kwang Street, Taichung, Taiwan, R.O.C.

**Códigos C102C / C102E / C102N / C102R /
C105A / C105C / C105G / C105S / C105T**

Garantía 1 año

Vida útil 2 años

93031 Emisión 2 04/2016



BASTONES DE MADERA



MANUAL DE USO

OTRA INFORMACION:

Importador: Target Medical S.A.

La Horqueta 1124, B1842BLF Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, Argentina

Director Técnico:

Ing. Eduardo Daniel Hurden, Matricula 4899

Fabricante:

Wooden Art Enterprise Co., Ltd.

3 F. No. 104, Chi Kwang Street, Taichung, Taiwan, R.O.C.

**Códigos C102C / C102E / C102N / C102R /
C105A / C105C / C105G / C105S / C105T**

Garantía 1 año

Vida útil 2 años

93031 Emisión 2 04/2016

INTRODUCCION

Los bastones de madera **Care-Quip Argentina** han sido diseñados para ayudar en la movilidad de un usuario individual y son aptos para el uso diario. El uso adecuado dará como resultado un producto duradero, manteniendo una buena relación de precio-calidad, ofreciendo confort y versatilidad al usuario para la solución de problemas de movilidad.

Es fundamental leer y entender todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto.

El uso incorrecto del producto podría perjudicar al mismo, al usuario y/o terceros.

Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

INSTRUCCIONES DE USO

Altura: La altura correcta permite que el usuario conserve una postura erecta con su codo ligeramente flexionado. Así, el peso del cuerpo descansa al caminar.

Uso: El producto debe ser utilizado con el mango orientado hacia atrás y normalmente empuñado con la mano opuesta a la pierna afectada.

Al caminar: Apoyar el producto en el suelo al mismo tiempo que lo hace con la pierna afectada.

Al levantarse de una silla: Inclinarsse hacia adelante, con una mano en el apoyabrazo de la silla y la otra en el producto. Incorporarse hacia adelante.

Al sentarse en una silla: Girar sobre sí mismo, hasta tocar la silla con la parte posterior de las piernas, apoyar las manos suavemente en los apoyabrazos, inclinarse hacia adelante y sentarse lentamente.

Al subir o bajar escaleras: Aferrarse del pasamano de la escalera y subir o bajar los escalones apoyando la ayuda para movilidad en el mismo escalón que la pierna afectada. La pierna no afectada debe ir siempre adelante.

ADVERTENCIAS

- Lea detenidamente todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto.
- Este producto debe ser chequeado regularmente en busca de cualquier defecto que ponga en riesgo la seguridad del usuario.
- Si la pata está quebrada, no usar el producto.
- Si el regatón está gastado, debe cambiarlo.
- El uso en días de lluvia debe hacerse con máximo cuidado para evitar caídas.

MANTENIMIENTO

- Limpiar el producto por lo menos una vez por semana, con un paño suave y húmedo, quitando el polvo que pueda estar acumulado.
- Nunca limpiar con productos abrasivos, amoníacos, lavandinas o diluyentes.
- En caso de haber mojado el producto, secar completamente con un paño suave y seco lo antes posible y dejar en un lugar cálido y seco, hasta asegurarse de haber logrado un secado total.
- En caso de no utilizar el producto por un largo período de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.
- Los regatones son vulnerables al desgaste. Se recomienda su reemplazo para evitar cualquier tipo de accidente.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, conexiones incorrectas, uso en distintas condiciones a las descritas en éste manual o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparación bajo garantía se deberá presentar éste certificado debidamente completado, junto a la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora:

Fecha:

Firma: Aclaración:

INTRODUCCION

Los bastones de madera **Care-Quip Argentina** han sido diseñados para ayudar en la movilidad de un usuario individual y son aptos para el uso diario. El uso adecuado dará como resultado un producto duradero, manteniendo una buena relación de precio-calidad, ofreciendo confort y versatilidad al usuario para la solución de problemas de movilidad.

Es fundamental leer y entender todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto.

El uso incorrecto del producto podría perjudicar al mismo, al usuario y/o terceros.

Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

INSTRUCCIONES DE USO

Altura: La altura correcta permite que el usuario conserve una postura erecta con su codo ligeramente flexionado. Así, el peso del cuerpo descansa al caminar.

Uso: El producto debe ser utilizado con el mango orientado hacia atrás y normalmente empuñado con la mano opuesta a la pierna afectada.

Al caminar: Apoyar el producto en el suelo al mismo tiempo que lo hace con la pierna afectada.

Al levantarse de una silla: Inclinarsse hacia adelante, con una mano en el apoyabrazo de la silla y la otra en el producto. Incorporarse hacia adelante.

Al sentarse en una silla: Girar sobre sí mismo, hasta tocar la silla con la parte posterior de las piernas, apoyar las manos suavemente en los apoyabrazos, inclinarse hacia adelante y sentarse lentamente.

Al subir o bajar escaleras: Aferrarse del pasamano de la escalera y subir o bajar los escalones apoyando la ayuda para movilidad en el mismo escalón que la pierna afectada. La pierna no afectada debe ir siempre adelante.

ADVERTENCIAS

- Lea detenidamente todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto.
- Este producto debe ser chequeado regularmente en busca de cualquier defecto que ponga en riesgo la seguridad del usuario.
- Si la pata está quebrada, no usar el producto.
- Si el regatón está gastado, debe cambiarlo.
- El uso en días de lluvia debe hacerse con máximo cuidado para evitar caídas.

MANTENIMIENTO

- Limpiar el producto por lo menos una vez por semana, con un paño suave y húmedo, quitando el polvo que pueda estar acumulado.
- Nunca limpiar con productos abrasivos, amoníacos, lavandinas o diluyentes.
- En caso de haber mojado el producto, secar completamente con un paño suave y seco lo antes posible y dejar en un lugar cálido y seco, hasta asegurarse de haber logrado un secado total.
- En caso de no utilizar el producto por un largo período de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.
- Los regatones son vulnerables al desgaste. Se recomienda su reemplazo para evitar cualquier tipo de accidente.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, conexiones incorrectas, uso en distintas condiciones a las descritas en éste manual o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparación bajo garantía se deberá presentar éste certificado debidamente completado, junto a la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora:

Fecha:

Firma: Aclaración: