



ASIENTO ELEVADO PARA INODOROS



MANUAL DE USO

OTRA INFORMACION:

Importador: Target Medical S.A.

La Horqueta 1124, B1842BLF Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, Argentina

Director Técnico:

Ing. Eduardo Daniel Hurden, Matrícula 4899

Fabricante: R. Poon Medical Products (Mingguang) Co., Ltd.

Qicang Road 116, 239400 Mingguang, Anhui Province 528000, R.O.C., China

Códigos D204

Garantía 1 año

Vida útil 2 años

93049 Emisión 2 04/2016



ASIENTO ELEVADO PARA INODOROS



MANUAL DE USO

OTRA INFORMACION:

Importador: Target Medical S.A.

La Horqueta 1124, B1842BLF Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, Argentina

Director Técnico:

Ing. Eduardo Daniel Hurden, Matrícula 4899

Fabricante: R. Poon Medical Products (Mingguang) Co., Ltd.

Qicang Road 116, 239400 Mingguang, Anhui Province 528000, R.O.C., China

Códigos D204

Garantía 1 año

Vida útil 2 años

93049 Emisión 2 04/2016

INTRODUCCION

El asiento elevado para inodoros **Care-Quip Argentina** está diseñado para facilitar el uso diario del inodoro por usuarios que presentan problemas de movilidad. Utilizado por aquellos que tienen dificultad para sentarse y pararse. Provee soporte y estabilidad adicional a las personas y ayuda a evitar posibles accidentes en el baño. El mismo ha sido diseñado para un usuario individual de hasta 120 Kg.

El uso adecuado dará como resultado un producto duradero, manteniendo una buena relación de precio-calidad.

Es fundamental leer y entender todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto.

El uso incorrecto del producto podría perjudicar al mismo, al usuario y/o terceros.

Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de usar el asiento elevado, asegurarse siempre de que esté firmemente instalado, asegurado y en su respectiva posición. Es importante que al sentarse y al levantarse el usuario se ayude mediante un tercero o mediante las barras de sujeción para evitar posibles accidentes.

- **AL SENTARSE**

Posicionarse frente al inodoro.

Girar 180° hasta tocar el inodoro y asiento elevado con la parte posterior de las piernas.

Inclinarse hacia adelante y sentarse lentamente.

- **AL LEVANTARSE**

Inclinarse hacia adelante y levantarse lentamente.

ADVERTENCIAS

Leer detenidamente todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el asiento elevado.

Respetar el peso máximo admitido del asiento elevado.

Es importante que el asiento elevado sea inspeccionado regularmente en busca de cualquier defecto que ponga en riesgo la seguridad del usuario.

Usuarios con limitaciones físicas deben ser supervisados o asistidos para usar el asiento elevado.

Al estar sentado sobre el asiento elevado el usuario debe centrar su peso. Si el peso es recargado sobre la parte delantera o en uno de los laterales del asiento elevado para inodoros puede inclinarse.

MANTENIMIENTO

Instrucciones de limpieza

- Enjuagar con agua tibia y secar con un paño no abrasivo.
- Nunca limpiar el asiento elevado con productos abrasivos, amoniacos, lavandinas o diluyentes.
- Es importante que el asiento elevado sea inspeccionado regularmente.
- En caso de no utilizar el asiento elevado por un largo período de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (DOCE) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, uso en distintas condiciones a las descritas en éste manual, o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparación bajo garantía, se deberá presentar con la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora:

Fecha:

Firma: **Aclaración:**

INTRODUCCION

El asiento elevado para inodoros **Care-Quip Argentina** está diseñado para facilitar el uso diario del inodoro por usuarios que presentan problemas de movilidad. Utilizado por aquellos que tienen dificultad para sentarse y pararse. Provee soporte y estabilidad adicional a las personas y ayuda a evitar posibles accidentes en el baño. El mismo ha sido diseñado para un usuario individual de hasta 120 Kg.

El uso adecuado dará como resultado un producto duradero, manteniendo una buena relación de precio-calidad.

Es fundamental leer y entender todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto.

El uso incorrecto del producto podría perjudicar al mismo, al usuario y/o terceros.

Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de usar el asiento elevado, asegurarse siempre de que esté firmemente instalado, asegurado y en su respectiva posición. Es importante que al sentarse y al levantarse el usuario se ayude mediante un tercero o mediante las barras de sujeción para evitar posibles accidentes.

- **AL SENTARSE**

Posicionarse frente al inodoro.

Girar 180° hasta tocar el inodoro y asiento elevado con la parte posterior de las piernas.

Inclinarse hacia adelante y sentarse lentamente.

- **AL LEVANTARSE**

Inclinarse hacia adelante y levantarse lentamente.

ADVERTENCIAS

Leer detenidamente todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el asiento elevado.

Respetar el peso máximo admitido del asiento elevado.

Es importante que el asiento elevado sea inspeccionado regularmente en busca de cualquier defecto que ponga en riesgo la seguridad del usuario.

Usuarios con limitaciones físicas deben ser supervisados o asistidos para usar el asiento elevado.

Al estar sentado sobre el asiento elevado el usuario debe centrar su peso. Si el peso es recargado sobre la parte delantera o en uno de los laterales del asiento elevado para inodoros puede inclinarse.

MANTENIMIENTO

Instrucciones de limpieza

- Enjuagar con agua tibia y secar con un paño no abrasivo.
- Nunca limpiar el asiento elevado con productos abrasivos, amoniacos, lavandinas o diluyentes.
- Es importante que el asiento elevado sea inspeccionado regularmente.
- En caso de no utilizar el asiento elevado por un largo período de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (DOCE) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, uso en distintas condiciones a las descritas en éste manual, o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparación bajo garantía, se deberá presentar con la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora:

Fecha:

Firma: **Aclaración:**