



## SOPORTA COBIJAS



### MANUAL DE USO

**OTRA INFORMACION:**

**Importador: Target Medical S.A.**

La Horqueta 1124, B1842BLF Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, Argentina

**Director Técnico:**

**Ing. Eduardo Daniel Hurden, Matricula 4899**

**Fabricante: R. Poon Medical Products (Mingguang) Co., Ltd.**

Qicang Road 116, 239400 Mingguang, Anhui Province 528000, R.O.C., China

**Códigos I102**

**Garantía 1 año**

**Vida útil 2 años**

**93053 Emisión 2 04/2016**



## SOPORTA COBIJAS



### MANUAL DE USO

**OTRA INFORMACION:**

**Importador: Target Medical S.A.**

La Horqueta 1124, B1842BLF Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, Argentina

**Director Técnico:**

**Ing. Eduardo Daniel Hurden, Matricula 4899**

**Fabricante: R. Poon Medical Products (Mingguang) Co., Ltd.**

Qicang Road 116, 239400 Mingguang, Anhui Province 528000, R.O.C., China

**Códigos I102**

**Garantía 1 año**

**Vida útil 2 años**

**93053 Emisión 2 04/2016**

## **INTRODUCCION**

El soporta cobija **Care-Quip Argentina** ha sido diseñado para brindar comodidad, seguridad y evitar la presión de las sabanas o frazadas sobre los miembros inferiores de usuarios de camas. Adaptable a la mayoría de las camas.

Es fundamental leer y entender todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto.

El uso incorrecto del producto podría perjudicar al mismo, al usuario y/o terceros.

Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

## **INSTRUCCIONES DE ARMADO**

1. Retirar el colchón.
2. Colocar el soporte cobija en la piecera de la cama.
3. Colocar el colchón.
4. Regular la altura mediante los botones de ajuste.
5. Colocar sobre el soporte cobija las sabanas o frazadas.

## **ADVERTENCIA**

El soporta cobija debe quedar coloco entre el colchón y los elásticos de la cama.

## **MANTENIMIENTO**

- Limpiar el soporta cobija por lo menos una vez por semana, con un paño suave y húmedo, quitando el polvo que pueda estar acumulado.
- Nunca limpiar el soporta cobija con productos abrasivos, amoníacos, lavandinas o diluyentes.
- En caso de haber mojado el soporta cobija, secar completamente con un paño suave lo antes posible y dejar en un lugar cálido y seco, hasta asegurarse de haber logrado un secado total.
- En caso de no utilizar el soporta cobija por un largo período de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.

## **CERTIFICADO DE GARANTIA**

**Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo.**

**Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, conexiones incorrectas, uso en distintas condiciones a las descriptas en éste manual o reparaciones por personal no autorizado.**

**En caso de requerir reparación bajo garantía se deberá presentar éste certificado debidamente completado, junto a la factura de compra correspondiente.**

**La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.**

**Casa vendedora:** .....

**Fecha:** .....

**Firma:** .....

**Aclaración:** .....

## **INTRODUCCION**

El soporta cobija **Care-Quip Argentina** ha sido diseñado para brindar comodidad, seguridad y evitar la presión de las sabanas o frazadas sobre los miembros inferiores de usuarios de camas. Adaptable a la mayoría de las camas.

Es fundamental leer y entender todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto.

El uso incorrecto del producto podría perjudicar al mismo, al usuario y/o terceros.

Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

## **INSTRUCCIONES DE ARMADO**

1. Retirar el colchón.
2. Colocar el soporte cobija en la piecera de la cama.
3. Colocar el colchón.
4. Regular la altura mediante los botones de ajuste.
5. Colocar sobre el soporte cobija las sabanas o frazadas.

## **ADVERTENCIA**

El soporta cobija debe quedar coloco entre el colchón y los elásticos de la cama.

## **MANTENIMIENTO**

- Limpiar el soporta cobija por lo menos una vez por semana, con un paño suave y húmedo, quitando el polvo que pueda estar acumulado.
- Nunca limpiar el soporta cobija con productos abrasivos, amoníacos, lavandinas o diluyentes.
- En caso de haber mojado el soporta cobija, secar completamente con un paño suave lo antes posible y dejar en un lugar cálido y seco, hasta asegurarse de haber logrado un secado total.
- En caso de no utilizar el soporta cobija por un largo período de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.

## **CERTIFICADO DE GARANTIA**

**Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo.**

**Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, conexiones incorrectas, uso en distintas condiciones a las descriptas en éste manual o reparaciones por personal no autorizado.**

**En caso de requerir reparación bajo garantía se deberá presentar éste certificado debidamente completado, junto a la factura de compra correspondiente.**

**La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.**

**Casa vendedora:** .....

**Fecha:** .....

**Firma:** .....

**Aclaración:** .....