



TABLA PARA BAÑERA



MANUAL DE USO

OTRA INFORMACION:

Importador: Target Medical S.A.

La Horqueta 1124, B1842BLF Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, Argentina

Director Técnico:

Ing. Eduardo Daniel Hurden, Matricula 4899

Fabricante: Apex Health Care Mfg., Inc.

20 Industrial 3rd Road, Tou Chiao Industrial Park, Ming Hsiung Shiang,
Chia-Yi Hsien, Taiwán.

Código D152

Garantía 1 año

Vida útil 2 años

93045 Emisión 2 04/2016



TABLA PARA BAÑERA



MANUAL DE USO

OTRA INFORMACION:

Importador: Target Medical S.A.

La Horqueta 1124, B1842BLF Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, Argentina

Director Técnico:

Ing. Eduardo Daniel Hurden, Matricula 4899

Fabricante: Apex Health Care Mfg., Inc.

20 Industrial 3rd Road, Tou Chiao Industrial Park, Ming Hsiung Shiang,
Chia-Yi Hsien, Taiwán.

Código D152

Garantía 1 año

Vida útil 2 años

93045 Emisión 2 04/2016

INTRODUCCION

La tabla para bañera **Care-Quip Argentina** está diseñada para facilitar el lavado e higienizado diario de personas que presentan problemas de movilidad. Provee soporte y estabilidad adicional a las personas y ayuda a evitar posibles accidentes en el baño. La misma es para un usuario individual de hasta 110 Kg.



El uso adecuado dará como resultado un producto duradero, manteniendo una buena relación de precio-calidad.

Es fundamental leer y entender todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto. El uso incorrecto del producto podría perjudicar al mismo, al usuario y/o terceros.

Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

INSTALACION

1. Colocar la tabla sobre la bañera.
2. Insertar las trabas de sujeción por debajo haciendo calzar los dientes de las mismas y colocar los tornillos para sujetarlas.
3. La parte antideslizante de las trabas deben sujetarse en los laterales de las bañeras. Las trabas se deben regular hasta que la tabla quede firmemente ajustada a la bañera.
4. Colocar la manija de sujeción para el mejor uso de la tabla.

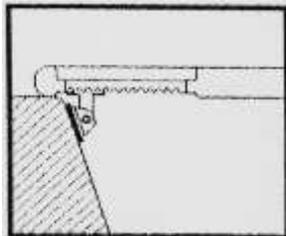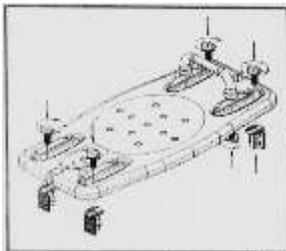

ADVERTENCIAS

- Lea detenidamente todo el contenido de éste manual antes de utilizar la tabla.
- No utilice la tabla para otro uso que no sea el de sentar, lavar e higienizar al usuario.
- Respete el peso máximo admitido de la tabla.
- Es importante que la tabla sea inspeccionada regularmente en busca de cualquier defecto que ponga en riesgo la seguridad del usuario.
- Asegúrese siempre que la tabla está instalada de forma firme y que no tenga movimiento.
- Cambie las trabas antideslizantes si estuvieran gastadas o dañadas.
- No utilice la tabla si no está seguro de su instalación o forma de uso.

MANTENIMIENTO

- Secar completamente la tabla con un paño suave después de cada utilización.
- Nunca limpiar la tabla con productos abrasivos, amoniacos, lavandinas o diluyentes.
- En caso de no utilizar la tabla por un largo período de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, conexiones incorrectas, uso en distintas condiciones a las descritas en éste manual o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparación bajo garantía se deberá presentar éste certificado debidamente completado, junto a la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora:

Fecha:

Firma: Aclaración:

INTRODUCCION

La tabla para bañera **Care-Quip Argentina** esta diseñada para facilitar el lavado e higienizado diario de personas que presentan problemas de movilidad. Provee soporte y estabilidad adicional a las personas y ayuda a evitar posibles accidentes en el baño. La misma es para un usuario individual de hasta 110 Kg.



El uso adecuado dará como resultado un producto duradero, manteniendo una buena relación de precio-calidad.

Es fundamental leer y entender todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto. El uso incorrecto del producto podría perjudicar al mismo, al usuario y/o terceros.

Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

INSTALACION

1. Colocar la tabla sobre la bañera.
2. Insertar las trabas de sujeción por debajo haciendo calzar los dientes de las mismas y colocar los tornillos para sujetarlas.
3. La parte antideslizante de las trabas deben sujetarse en los laterales de las bañeras. Las trabas se deben regular hasta que la tabla quede firmemente ajustada a la bañera.
4. Colocar la manija de sujeción para el mejor uso de la tabla.

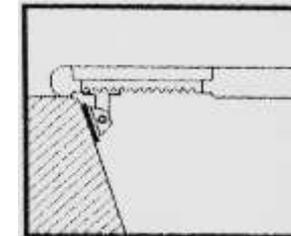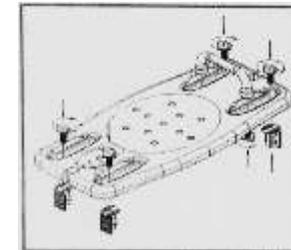

ADVERTENCIAS

- Lea detenidamente todo el contenido de éste manual antes de utilizar la tabla.
- No utilice la tabla para otro uso que no sea el de sentar, lavar e higienizar al usuario.
- Respete el peso máximo admitido de la tabla.
- Es importante que la tabla sea inspeccionada regularmente en busca de cualquier defecto que ponga en riesgo la seguridad del usuario.
- Asegúrese siempre que la tabla está instalada de forma firme y que no tenga movimiento.
- Cambie las trabas antideslizantes si estuvieran gastadas o dañadas.
- No utilice la tabla si no está seguro de su instalación o forma de uso.

MANTENIMIENTO

- Secar completamente la tabla con un paño suave después de cada utilización.
- Nunca limpiar la tabla con productos abrasivos, amoniacos, lavandinas o diluyentes.
- En caso de no utilizar la tabla por un largo período de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, conexiones incorrectas, uso en distintas condiciones a las descritas en éste manual o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparación bajo garantía se deberá presentar éste certificado debidamente completado, junto a la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora:

Fecha:

Firma: Aclaración: