



ANDADORES

OTRA INFORMACION:

Importador: Target Medical S.A.
La Horqueta 1124, B1842BLF Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, Argentina

Director Técnico:
Ing. Eduardo Daniel Hurden, Matrícula 4899

PM-1813-30

Fabricante: Jianlian Home Care Products Co Ltd
Xiebian Industrial Park Dali, NanHai District, Foshan City GuangDong Province, China

Códigos C631G / C631N / C661

Garantía 1 año

Vida útil 2 años

93085 Emisión 1 03/2019



MANUAL DE USO

INTRODUCCION

Los andadores **Care-Quip Argentina** están diseñados para ayudar a caminar. Además proveen soporte y estabilidad adicional a las personas y ayudan a evitar posibles accidentes. El uso adecuado dará como resultado un producto duradero, manteniendo una buena relación de precio-calidad. Es fundamental leer y entender todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto. El uso incorrecto del producto podría perjudicar al mismo, al usuario y/o terceros. Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

ADVERTENCIAS

- Leer detenidamente todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el andador.
- Al utilizar el andador siempre tener presente los riesgos de lesiones hacia uno mismo y hacia otras personas.
- El andador es un soporte adicional, no debe utilizarse para otro fin que no sea éste.
- El andador debe estar plenamente abierto antes de su uso.
- El andador no se debe usar para subir o bajar escaleras.
- Es importante que el andador sea inspeccionado regularmente en busca de cualquier defecto.
- Ajustar las uniones del andador si estuvieran flojas.
- No utilizar el andador si los agujeros en las zonas de ajuste estuvieran alongados.

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS ANDADORES						
Especificaciones Técnicas Tipo y Códigos	Material de fabricación	Terminación	Color	Regulación de altura (cm)	Ancho total (cm)	Otras especificaciones
Andador plegable de 3 ruedas con bolsa, bandeja, canasto y frenos C631G	Aluminio ultraliviano	Pintado Epoxi	Gris	80-97	60	• Frenos de doble acción.
Andador plegable de 3 ruedas con bolsa y frenos C631N	Aluminio ultraliviano	Pintado Epoxi	Negro	82-97	60	• Frenos de doble acción
Andador plegable con asiento, bolsa y frenos C661	Aluminio ultraliviano	Pintado	Azul	78 a 88	72	• Fácil plegado • Ruedas delanteras giratorias • Ruedas traseras fijas con frenos manuales

PRESENTACION

La presentación del andador es individual.

ARMADO Y PLEGADO

CODIGO C631G / C631N

- ARMADO: Tome el andador y ábralo desplazando las patas en direcciones opuestas. Coloque las manijas y fíjelas mediante las perillas provistas. Coloque el bolso abrazando las solapas sobre el caño y abrochándolo. Coloque el canasto encastrando en los ganchos que están soldados en el frente, al colocar el canasto evita que el andador se cierra solo. Coloque la bandeja que tapa el canasto, si así lo desea.
- CERRAR: Descoloque el canasto y tire la manija para plegar el andador

CODIGO C661

- ARMADO: Tome el andador y ábralo desplazando las patas en direcciones opuestas. Coloque las manijas y fíjelas mediante las perillas provistas. Coloque el respaldo en las ranuras provistas por arriba del asiento hasta oír un click generado por los botones de traba.
- PLEGADO: Levante el asiento y tire de la soga hacia arriba. Si el canasto estuviera por debajo del asiento, deberá sacarlo para tirar de la soga.

USO DEL ANDADOR

Antes de utilizar el andador, regular la altura por medio de las perillas ubicadas en las manijas, según el modelo de andador. La altura óptima permite que el usuario conserve una postura erecta con sus codos ligeramente flexionados. De esta manera el peso del cuerpo descansa sobre el andador al caminar.

- AL LEVANTARSE
Coloque el andador frente a usted.
Incorpórese inclinándose hacia adelante con ambas manos en las empuñaduras del andador.
- AL CAMINAR
Posicione el andador un paso más adelante.
Dé un paso con una de sus piernas, si tuviera una pierna afectada primero con ésta, y luego dé un paso con la otra.
Cuando haya ganado confianza con el uso del mismo, levante y avance con el andador en tramos cortos. Si el andador posee ruedas, simplemente empújelo.
- AL SENTARSE
Posiciónese frente al asiento.
Gire 180° hasta tocar el asiento con la parte posterior de las piernas.
Inclínese hacia adelante y siéntese lentamente.
En caso de los andadores con asiento código C601 y C651, apoyar de forma firme o activar los frenos bajando las palancas, dependiendo del modelo, antes de sentarse.

MANTENIMIENTO

- Limpiar periódicamente el andador con un paño suave o una esponja humedecida en agua y detergente inocuo, para quitar el polvo que pueda estar acumulando en la estructura del mismo.
- Nunca limpiar el andador con productos abrasivos, amoníacos, lavandinas o diluyentes.
- Es importante que el andador sea inspeccionado regularmente, y asegurarse que:
 - Las uniones del andador no estén flojas.
 - Las empuñadoras del andador no estén dañadas o rajadas.
 - Los agujeros en la zona de ajuste no estén elongados.
- En caso de no utilizar el andador por un largo periodo de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material de la misma.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, conexiones incorrectas, uso en distintas condiciones a las descritas en éste manual o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparación bajo garantía se deberá presentar éste certificado debidamente completado, junto a la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora:

Fecha:

Firma: Aclaración: