



## CONTORNO PARA PLATOS



### MANUAL DE USO

**OTRA INFORMACION:**

**Importador: Target Medical S.A.**  
La Horqueta 1124, Monte Grande 1842, Buenos Aires, Argentina

**Director Técnico:**  
Ing. Eduardo Daniel Hurden, Matricula 4899

**Fabricante: Baoding Xinlongtongda Trade Co., Ltd.**  
No. 304 Business Shop, Yinxing Road, Baoding City, Hebei, China

**Código H104**

**Garantía 1 año**

**Vida útil 2 años**

**93058 Emisión 1 11/2016**



## CONTORNO PARA PLATOS



### MANUAL DE USO

**OTRA INFORMACION:**

**Importador: Target Medical S.A.**  
La Horqueta 1124, Monte Grande 1842, Buenos Aires, Argentina

**Director Técnico:**  
Ing. Eduardo Daniel Hurden, Matricula 4899

**Fabricante: Baoding Xinlongtongda Trade Co., Ltd.**  
No. 304 Business Shop, Yinxing Road, Baoding City, Hebei, China

**Código H104**

**Garantía 1 año**

**Vida útil 2 años**

**93058 Emisión 1 11/2016**

## CONTORNO PARA PLATOS

El contorno para platos **Care-Quip Argentina** está diseñado para facilitar la alimentación con una sola mano. Fabricado en plástico flexible. Adaptable en platos de 13 cm a 25 cm de diámetro.

El uso adecuado dará como resultado un producto duradero, manteniendo una buena relación de precio-calidad.

Es fundamental leer y entender todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto.

El uso incorrecto del producto podría perjudicar al mismo, al usuario y/o terceros.

Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

## INSTRUCCIONES DE USO

Expandir el contorno para platos al tamaño requerido y encajar los ganchos al borde del plato.

Colocar el contorno para platos permite empujar la comida contra el mismo, a fin de ayudar a poner la comida sobre el cubierto, reduciendo el esfuerzo y los derrames de comida fuera del plato.

## MANTENIMIENTO

- El contorno para platos puede lavarse con agua caliente y detergente después de cada uso.
- Puede lavarse en un lavavajillas.
- Nunca limpiar el contorno para platos con productos abrasivos, amoníacos, lavandinas o diluyentes.
- En caso de no utilizar el contorno para platos por un largo período de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, conexiones incorrectas, uso en distintas condiciones a las descritas en éste manual o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparación bajo garantía se deberá presentar éste certificado debidamente completado, junto a la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora: .....

Fecha: .....

Firma: ..... Aclaración: .....

## CONTORNO PARA PLATOS

El contorno para platos **Care-Quip Argentina** está diseñado para facilitar la alimentación con una sola mano. Fabricado en plástico flexible. Adaptable en platos de 13 cm a 25 cm de diámetro.

El uso adecuado dará como resultado un producto duradero, manteniendo una buena relación de precio-calidad.

Es fundamental leer y entender todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto.

El uso incorrecto del producto podría perjudicar al mismo, al usuario y/o terceros.

Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

## INSTRUCCIONES DE USO

Expandir el contorno para platos al tamaño requerido y encajar los ganchos al borde del plato.

Colocar el contorno para platos permite empujar la comida contra el mismo, a fin de ayudar a poner la comida sobre el cubierto, reduciendo el esfuerzo y los derrames de comida fuera del plato.

## MANTENIMIENTO

- El contorno para platos puede lavarse con agua caliente y detergente después de cada uso.
- Puede lavarse en un lavavajillas.
- Nunca limpiar el contorno para platos con productos abrasivos, amoníacos, lavandinas o diluyentes.
- En caso de no utilizar el contorno para platos por un largo período de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, conexiones incorrectas, uso en distintas condiciones a las descritas en éste manual o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparación bajo garantía se deberá presentar éste certificado debidamente completado, junto a la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora: .....

Fecha: .....

Firma: ..... Aclaración: .....